

Tunstall

DEUTSCH



Datenblattkatalog

Telecare

Da wir unsere Produkte kontinuierlich weiterentwickeln, können sich Produktspezifikationen und Aussehen ohne Vorankündigung ändern. Tunstall übernimmt keine Verantwortung für etwaige Fehler und Auslassungen in diesem Dokument.

© 2026 Tunstall GmbH. TUNSTALL ist eine eingetragene Marke von TUNSTALL INTEGRATED HEALTH & CARE LIMITED

Inhaltsverzeichnis

1. Telecare-Geräte	5
Lifeline Digital	6
022-25-904	6
Lifeline® Vi classic	9
57008/620	9
Lifeline® Vi+	12
57108/620	12
2. Telecare-Notrufempfänger	15
Mobiler Funkempfänger-T	16
Z00820500	16
Orion Range Extender	18
75071800	18
3. Persönliche Funksender, Falldetektoren	19
Lifeline Pendant - 2-Way Secure	20
P62505/005	20
Lifeline Pendant - Classic AP	22
P62405/002	22
MyAmie, creme/rot	24
P68007/02	24
MyAmie, grau/schwarz	26
P68007/04	26
Vibby Falldetektor 4	28
67605/26	28
4. Funkzubehör	30
Funk-Zugtaster-T UP	31
Z00820295	31
Funk-Ruftaster-T	33
Z00820280	33
Großflächen-Funk-Pneumatiktaster	34
Z00820115	34
Bewegungsmelder	35
62505/035	35
Vernetzter Rauchwarnmelder	37
1423801	37
Raumtemperaturmelder	38
61005/40	38
Nexa Smart Plug	39
92199/157	39
Universalsensor	40
62505/030	40
Funk-Sensormatte 869 MHz	43
Z00800201	43
Funk-Trittsensormatte CM	44
Z00800301	44

Funk-Trittsensormatte NM	45
Z00800302	45
Blitzlicht-Empfänger	46
75071603	46
Telefonsender	47
75071602	47
Türklingel-Signalsender	48
75071605	48
ambiact T1	49
75071402	49
Funk-Blitzalarm-T	51
Z00820271	51
Funk-Steckdose-T	52
Z00820270	52
5. Verdrahtetes Zubehör	54
Zugtaster	55
75040004	55
Ruftaster	56
75040008	56
Birntaster mit 2 Ruftasten, 3 m	57
75040006	57
Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen	58
75040005	58
Sensormatte mit freien Kabelenden	59
Z00800200	59
6. Mobile Notrufgeräte	60
MobileCare.pro (weiß)	61
75121000	61
MobileCare.pro (schwarz)	63
75121020	63
7. Servicezentrale PNC	65
PNC8 Grundmodul	66
PNC 365 Hosting	67
8. Zubehör	68
Ersatzakkus	68
Steckernetzteile	69
Externe Mobilfunkantennen	71
Wandhalterungen und Tischfüße	72
Geräteaufkleber	74
Zubehör zu Mobiler Funkempfänger-T	75
Zubehör zu MyAmie	76
Programmiertools	78
Bett- und Stuhlsensormatten	78
Leitungen und Stecker	79
Einbaudosen, Aufputz-Kappen	81

1. Telecare-Geräte

Inhalt

Lifeline Digital	6
022-25-904	6
Lifeline® Vi classic	9
57008/620	9
Lifeline® Vi+	12
57108/620	12

Lifeline Digital

022-25-904



Allgemeine Beschreibung

Hausnotrufgerät zur Rufauslösung mit automatischer Freisprechverbindung zur Servicezentrale. Funksender Lifeline Pendant zur drahtlosen Rufauslösung im Lieferumfang. Betrieb im Mobilfunknetz und Anschluss an einen IP-Router.

Kommunikation mit IP-Protokollen über Mobilfunknetz oder über eine lokale Ethernet-Verbindung. Das Gerät verfügt über ein 4G/LTE-Modem mit Rückfall auf 2G. Es unterstützt VoIP- und VoLTE-Sprachanrufe.

Fernüberwachung des Gerätes über die cloudbasierte Device Management Plattform von Tunstall (DMP). Die DMP überwacht den Status der Geräte und kann Firmware- und Konfigurations-Updates an ein Gerät oder eine Gruppe von Geräten übertragen.

Integrierte Smart-Sensor-Plattform kann so programmiert werden, dass Telecare-Sensoren, Zeitsteuerung und zusätzliche Auslöser kombiniert werden können, um skalierbare Funktionalität zu schaffen, wie zum Beispiel ein virtueller Abwesenheitssensor oder virtueller Bettsensor.

Positionsnummer im Pflegehilfsmittelkatalog:
52.40.01.1124

Notruf

- Große Ruftaste mit leuchtendem roten Rand
- Bei Notruf optische Anzeige und Sprachansage
- Hochwertige, integrierte Freisprecheinrichtung
- 13 programmierbare Telefonnummern
- 11 programmierbare IP-Adressen
- IP-Kommunikationsprotokolle: SCAIP nach EN50134-9, IPACS, SIP Telefonie
- Analoge/GSM Kommunikationsprotokolle: Telefon, weitere analoge Protokolle

Aktivitätsfunktion

- Aktivitätsfunktion durch die Teilnehmerin oder den Teilnehmer
- Taste zum Ein-/Ausschalten der Aktivitätsfunktion
- Verschiedene automatische Aktivitätsfunktionen mit zusätzlichen Sensoren realisierbar

Anschlüsse

- Einfache Installation
- Mini-SIM-Kartenhalter im Akkufach
- Ethernet/Netzwerk-Anschluss (RJ45)
- Steckernetzteil zur Spannungsversorgung
- SMA-Antennenanschluss
- USB-2.0-Port

Zusatzfunktionen

- Sprachansage und optische Anzeige der aktuellen Mobilfunk-Signalstärke hilft beim Auffinden des optimalen Standortes
- Zahlreiche Programmiermöglichkeiten für individuelle Anwendungen
- Sprachunterstützung bei der Bedienung
- Integrierter Temperatursensor mit programmierbaren Hoch- und Niedrigtemperaturalarmen
- Protokollierung mittels Device Management Plattform (DMP)
- Zeitliche Steuerung zur Konfiguration von Zeitplänen für Funktionen und Notrufbehandlung

Funksensoren

- Anbindung von 64 Funksensoren möglich für z.B.: Rauchwarnmelder, Nexa Smart Plug
- Einfache Zuordnung der Funksensoren über Plug & Play
- Funkprotokolle: Tunstall 2-Way Secure Connected Radio, Tunstall Classic Radio
- Verwendung als Smart Home Zentrale

Programmierung

- Das komplette Management des Lifeline Digital wird über die Device-Management-Plattform (DMP) durchgeführt. Programmierungen sind über einen Online-Zugang mittels Browser möglich.
- Tunstall+ App: Alternativ kann auch die Tunstall+ App zur Programmierung verwendet werden.

Sicherheit

- Zwei-Stufen-Authentifizierung bei der Programmierung
- Umfangreiche Selbsttests
- Akustische und optische Anzeige von Störungen (Sprachansagen)
- Geräteüberwachung per Heartbeat
- Notstromakku für Betrieb bei Netzausfall. „Akku schwach“-Meldung an die Servicezentrale
- Warnung bei Stromausfall

Lifeline Pendant im Lieferumfang

- Zur drahtlosen Rufauslösung
- Ruftaste mit roter LED-Auslöseanzeige und grüner LED-Bestätigungsanzeige (Lifeline Digital hat das Rufsignal erfolgreich empfangen)
- Kontrollanzeige und automatische Überwachung der Batterie
- Link-Test zur Funkstreckenüberwachung
- Funkprotokoll Tunstall 2-Way Secure
- Funkreichweite: Mindestens 30 Meter innerhalb von Gebäuden. Mindestens 250 Meter im Freien.
- Hausnotruf-Frequenzband
- Wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen (bis zu 30 Min. in maximal 1 m Tiefe); geeignet zur Verwendung unter der Dusche.
- Halskordel und Stretcharmband

- Lithium-Knopfzelle; CR2450; 3,0 V; wechselbar
- Batterielebensdauer bis zu 5 Jahre oder 30.000 Notrufübertragungen (diese Dauer kann durch Faktoren wie extreme Temperaturen, schwache oder unterbrochene Verbindungen und Batterialterung verkürzt werden)

Technische Daten Lifeline Digital

Abmessungen (HxBxT):	98 x 180 x 58 mm
Gewicht:	491 g Nettogewicht
Gehäusefarbe:	Weiß
Gehäusematerial:	PC/ASA
Netzspannungsversorgung:	230 V AC (1,5 W, typisch)
Notstromakku:	Lithium-Ionen-Akku, 18 Wh, 2500 mAh Kapazität, Batteriemanagement
Notstromakku-Betriebszeit:	Bis zu 72 Stunden Standby-Betrieb mit einem 5-minütigen Heartbeat und normaler Nutzung.
Mobilfunk:	2G, 4G (GSM/GPRS/Edge/UMTS/LTE und VoLTE)
Umgebungstemperatur Betrieb:	0 bis +55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung:	-20 bis +45 °C (max. 3 Monate Lagerung)
Relative Luftfeuchte Betrieb:	0 bis 90 %, nicht kondensierend
Relative Luftfeuchte Lagerung:	0 bis 95 %, nicht kondensierend

Technische Daten Lifeline Pendant - 2-Way Secure

Abmessungen (H x Ø):	13 x 35 mm (ohne Anbauteile)
Gewicht:	16 g (ohne Anbauteile)
Funkfrequenzen:	869,2125 MHz und 868,3000 MHz

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
022-25-904	Lifeline Digital	
Optionales Zubehör:		
022-25-015-01	Externe Antenne (Weiß)	siehe Anhang „Zubehör“
Ersatzteile:		
022-25-012	Ersatzakku: Li-Ionen-Akku; 3,7 V; 2600 mAh	siehe Anhang „Zubehör“
022-25-013	Steckernetzteil 12 V (weiß), Typ: SP-221585	siehe Anhang „Zubehör“
P62505/005	Lifeline Pendant - 2-Way Secure, mit Armband und Halskordel	siehe eigenes Datenblatt
022-25-229-01	Rückseitendeckel Lifeline Digital	siehe Anhang „Zubehör“
Technische Dokumentation:		
346 80 21-57	Lifeline Digital Schnellanleitung (Verpackungsbeilage)	Download von tunstall.de
346 80 21-58	Lifeline Digital Benutzerhandbuch	Download von tunstall.de
00880496	Kurzanleitung für Hausnotruf-Teilnehmer mit Aktivitätsfunktion - Abwesenheitsmeldung mit gelber Taste (Klassischer Modus)	Download von tunstall.de
00880497	Kurzanleitung für Hausnotruf-Teilnehmer mit Aktivitätsfunktion - Abwesenheitsmeldung mit grüner Taste (Normaler Modus)	Download von tunstall.de
346 80 21-65	Lifeline Digital Installationshandbuch	Download von tunstall.de
346 80 21-52	Device-Management-Plattform (DMP) Benutzerhandbuch	Download von tunstall.de

Lifeline® Vi classic

57008/620



Allgemeine Beschreibung

Hausnotrufgerät zum Anschluss an analoge Amtsanschlüsse und/oder VoIP-Übertragungsstrecken. Rufauslösung mit automatischer Freisprechverbindung zur Servicezentrale. Funksender MyAmie zur drahtlosen Rufauslösung und Anrufannahme im Lieferumfang..

Notruf

- Große Ruftaste mit leuchtendem roten Rand
- Bei Notruf optische Anzeige und Sprachansage
- Hochwertige, integrierte Freisprecheinrichtung
- 10 Telefonnummern individuell programmierbar
- Grüne Abstelltaste mit Prägung für Sehbehinderte
- Multiprotokollfähig, d.h. neben Tunstall-Protokollen auch andere, z.B. CPC- und ANT-Protokoll

Aktivitätskontrolle

- Aktivitätskontrolle der Teilnehmerin oder des Teilnehmers
- Gelbe Abwesenheitstaste zum Ein-/Ausschalten von Aktivitätskontrolle, Funkstreckenüberwachung des MyAmie und optional Einbruchüberwachung
- Verschiedene automatische Aktivitätskontrollen realisierbar

Anschlüsse

- Einfache Installation

- Steckernetzteil zur Spannungsversorgung
- Telefonanschlussleitung (3 m lang) mit TAE-N-codiertem Stecker zum Anschluss an TAE-Dose
- Kontakteingang für geeignete, fest-verdrahtete potentialfreie Schalter (Schließer oder Öffner) wie z.B. einen Rufzugtaster

Gehäuse

- Tischaufstellung (stehend oder liegend) oder Wandmontage
- Schmutzunempfindliche, leicht zu reinigende Oberfläche
- Abnehmbare Lautsprecherabdeckung zur besseren Reinigung

Zusatzfunktionen

- Annehmen und Beenden von Telefongesprächen aus der Distanz über MyAmie oder am Gerät
- Gesprächslautstärke für angenommene Telefonate einstellbar
- Klingelton ausschaltbar (Schalter am Gehäuseboden)
- Zahlreiche Programmiermöglichkeiten für individuelle Anwendungen
- Gelbe Taste als Servicetaste konfigurierbar
- Sprachunterstützung bei der Bedienung
- Integrierter Temperatursensor mit programmierbaren Hoch- und Niedrigtemperaturalarmen
- Protokollfunktion (Microsoft Excel-Exportfunktion der Rufhistorie) mittels Software „PC Connect“

Funksensoren

- Anbindung von 15 Funksensoren möglich für z.B.: Rauchwarnmelder, Funk-Zugtaster
- Einfache Zuordnung der Funksensoren über Plug & Play
- Funkprotokoll Tunstall Classic Radio
- Verwendung als Sicherheitszentrale durch Anbindung von Funk-Rauchwarnmelder und/oder Überfallsender

Programmierung

- Vor-Ort-Programmierung über externes Keypad (nicht im Lieferumfang)
- Vor-Ort-Programmierung über parallel (nicht im Lieferumfang) angeschlossenes Telefon
- Vor-Ort-Programmierung mit PC oder Laptop über Software „PC Connect“ (nicht im Lieferumfang)
- Fernprogrammierung durch Servicezentrale (ohne Teilnehmerbeteiligung möglich)

Sicherheit

- Vorrang von Notrufen vor allen anderen Telefonfunktionen
- Umfangreiche Selbsttests
- Akustische Anzeige von Störungen (Sprachansagen)
- Telefonleitungsüberwachung
- Wiederaufladbarer Notstromakku für Betrieb bei Netzausfall. „Akku schwach“-Meldung an die Servicezentrale
- Warnung bei Stromausfall
- Funktion zur automatischen Überprüfung des gesamten Notrufvorgangs
- Patentiertes Protokollübertragungsverfahren STMF, entwickelt für den sicheren Betrieb auch im modernen Telefonübertragungsnetz (Festnetz, GSM, VoIP)

MyAmie im Lieferumfang

- Zur drahtlosen Rufauslösung
- Rote Ruftaste mit LED-Auslöseanzeige
- Kontrollanzeige und automatische Überwachung der Batterie

- Funkstreckenüberwachung
- Funkprotokoll Tunstall Classic Radio
- Funkreichweite: Mindestens 30 Meter innerhalb von Gebäuden. Mindestens 250 Meter im Freien.
- Hausnotruf-Frequenzband
- Wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen (bis zu 30 Min. in maximal 1 m Tiefe); geeignet zur Verwendung unter der Dusche.
- Halskordel und Stretcharmband
- Batterielebensdauer bis zu 7 Jahre (diese Dauer kann durch Faktoren wie extreme Temperaturen, schwache oder unterbrochene Verbindungen und Batteriealterung verkürzt werden)
- Langlebige Materialbeständigkeit durch den Einsatz von dem Hochleistungskunststoff Hytrel®.

Technische Daten Lifeline Vi classic

Abmessungen (HxBxT):	45 x 185 x 122 mm
Gewicht:	575 g
Gehäusematerial:	ABS
Standby-Leistungsaufnahme:	3 W
Notstromakku:	Ni-MH-Akku, 7,2 V, 1200 mAh
Umgebungstemperatur:	
• Betrieb:	0 bis +40 °C
• Lagerung:	-10 bis +50 °C

Technische Daten MyAmie

Abmessungen (HxBxT):	14 x 27 x 36 mm
Gewicht:	7 g
Funkfrequenz:	869,2125 MHz

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
57008/620	Lifeline® Vi classic	Gelbe Abwesenheitstaste, grüne Abstelltaste
Optionales Zubehör:		
51900/10	Keypad	zur Programmierung vor Ort am Lifeline Vi
D5702905A	Wandhalterung für Lifeline Vi und Vi+	für verbessertes Kabelmanagement bei Wandmontage
D5702907	Tischfuß inkl. Wandhalterung für Lifeline Vi und Lifeline Vi+	für Tischaufstellung mit Neigung

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
00880115	Lifeline Vi und Lifeline Vi+ Techniker-Handbuch	Download von tunstall.de

Lifeline® Vi+

57108/620



Allgemeine Beschreibung

Hausnotrufgerät zum Anschluss an analoge Amtsanschlüsse und/oder VoIP-Übertragungsstrecken. Rufauslösung mit automatischer Freisprechverbindung zur Servicezentrale. Zusätzliche oder alleinige Rufauslösung zu Kontaktperson (Angehöriger, Pflegepersonal).

Funksender MyAmie zur drahtlosen Rufauslösung und Anrufannahme im Lieferumfang.

Notruf

- Große Ruftaste mit leuchtendem roten Rand
- Bei Notruf optische Anzeige und Sprachansage
- Hochwertige, integrierte Freisprecheinrichtung
- 10 Telefonnummern individuell programmierbar
- Grüne Abstelltaste mit Prägung für Sehbehinderte
- Ausführliche Sprachansage bei Notrufauslösung zu Kontaktperson
- Ansage des Namens der Teilnehmerin oder des Teilnehmers möglich
- Rufbearbeitung per Telefon/Handy, Steuerung über Tastentöne
- Multiprotokollfähig, d.h. neben Tunstall-Protokollen auch andere, z.B. CPC- und ANT-Protokoll

Aktivitätskontrolle

- Aktivitätskontrolle der Teilnehmerin oder des Teilnehmers (erweiterte Konfiguration)
- Gelbe Abwesenheitstaste zum Ein-/Ausschalten von Aktivitätskontrolle, Funkstreckenüberwachung des MyAmie und optional Einbruchüberwachung
- Verschiedene automatische Aktivitätskontrollen realisierbar

Anschlüsse

- Einfache Installation
- Steckernetzteil zur Spannungsversorgung
- Telefonanschlussleitung (3 m lang) mit TAE-N-codiertem Stecker zum Anschluss an TAE-Dose
- Kontakteingang für geeignete, fest-verdrahtete potentialfreie Schalter (Schließer oder Öffner) wie z.B. einen Rufzugtaster
- Schaltausgang (potentialfreier Wechselkontakt) z.B. zum Anschluss eines Türöffners

Gehäuse

- Tischaufstellung (stehend oder liegend) oder Wandmontage
- Schmutzunempfindliche, leicht zu reinigende Oberfläche
- Abnehmbare Lautsprecherabdeckung zur besseren Reinigung

Zusatzfunktionen

- Annehmen und Beenden von Telefongesprächen aus der Distanz über MyAmie oder am Gerät
- Gesprächslautstärke für angenommene Telefonate einstellbar
- Klingelton ausschaltbar (Schalter am Gehäuseboden)
- Zahlreiche Programmiermöglichkeiten für individuelle Anwendungen
- Gelbe Taste als Servicetaste konfigurierbar
- Sprachunterstützung bei der Bedienung
- Integrierter Temperatursensor mit programmierbaren Hoch- und Niedrigtemperaturalarmen

- Flexibel einstellbare Erinnerungsfunktionen z. B. tägliche Medikamentenerinnerung, 6 verschiedene Erinnerungen
- Zugang ohne Schlüssel programmierbar, d.h. Öffnung der Eingangstür mittels Pfleger:innen-Funksender oder von der Servicezentrale
- Überwachung kritischer Besuche, d.h. ob z.B. Besuche des Pflegedienstes planmäßig erfolgen
- Protokollfunktion (Microsoft Excel-Exportfunktion der Rufhistorie) mittels Software „PC Connect“

Funksensoren

- Anbindung von 35 Funksensoren möglich für z.B.: Rauchwarnmelder, Funk-Zugtaster
- Einfache Zuordnung der Funksensoren über Plug & Play
- Funkprotokoll Tunstall Classic Radio
- Virtuelle Sensor-Technik (Notrufauslösung durch einstellbare Sensor-Abhängigkeiten)
- Verwendung als Sicherheitszentrale durch Anbindung von Funk-Rauchwarnmelder und/oder Überfallsender
- Abspielen von Mitteilungen am Gerät, wenn ein definierter Sensor aktiviert wurde

Programmierung

- Vor-Ort-Programmierung über externes Keypad (nicht im Lieferumfang)
- Vor-Ort-Programmierung über parallel (nicht im Lieferumfang) angeschlossenes Telefon
- Vor-Ort-Programmierung mit PC oder Laptop über Software „PC Connect“ (nicht im Lieferumfang)
- Fernprogrammierung durch Servicezentrale (ohne Teilnehmerbeteiligung möglich)

Sicherheit

- Vorrang von Notrufen vor allen anderen Telefonfunktionen
- Umfangreiche Selbsttests
- Akustische Anzeige von Störungen (Sprachansagen)
- Telefonleitungsüberwachung
- Wiederaufladbarer Notstromakku für Betrieb bei Netzausfall. „Akku schwach“-Meldung an die Servicezentrale

- Warnung bei Stromausfall
- Funktion zur automatischen Überprüfung des gesamten Notrufvorgangs
- Patentiertes Protokollübertragungsverfahren STMF, entwickelt für den sicheren Betrieb auch im modernen Telefonübertragungsnetz (Festnetz, GSM, VoIP)

MyAmie im Lieferumfang

- Zur drahtlosen Rufauslösung
- Rote Ruftaste mit LED-Auslöseanzeige
- Kontrollanzeige und automatische Überwachung der Batterie
- Funkstreckenüberwachung
- Funkprotokoll Tunstall Classic Radio
- Funkreichweite: Mindestens 30 Meter innerhalb von Gebäuden. Mindestens 250 Meter im Freien.
- Hausnotruf-Frequenzband
- Wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen (bis zu 30 Min. in maximal 1 m Tiefe); geeignet zur Verwendung unter der Dusche.
- Halskordel und Stretcharmband
- Batterielebensdauer bis zu 7 Jahre (diese Dauer kann durch Faktoren wie extreme Temperaturen, schwache oder unterbrochene Verbindungen und Batteriealterung verkürzt werden)
- Langlebige Materialbeständigkeit durch den Einsatz von dem Hochleistungskunststoff Hytrel®.

Technische Daten Lifeline Vi+

Abmessungen (HxBxT):	45 x 185 x 122 mm
Gewicht:	628 g
Gehäusematerial:	ABS
Standby-Leistungsaufnahme:	3 W
Notstromakku:	Ni-MH-Akku, 7,2 V, 1200 mAh
Umgebungstemperatur:	
• Betrieb:	0 bis +40 °C
• Lagerung:	-10 bis +50 °C

Technische Daten MyAmie

Abmessungen (HxBxT):	14 x 27 x 36 mm
Gewicht:	7 g
Funkfrequenz:	869,2125 MHz

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
57108/620	Lifeline® Vi+	Gelbe Abwesenheitstaste, grüne Abstelltaste
Optionales Zubehör:		
51900/10	Keypad	zur Programmierung vor Ort am Lifeline Vi+
D5702905A	Wandhalterung für Lifeline Vi und Vi+	für verbessertes Kabelmanagement bei Wandmontage
D5702907	Tischfuß inkl. Wandhalterung für Lifeline Vi und Lifeline Vi+	für Tischaufstellung mit Neigung
00880115	Lifeline Vi und Lifeline Vi+ Techniker-Handbuch	Download von tunstall.de

2. Telecare-Notrufempfänger

Inhalt

mobiler Funkempfänger-T	16
Z00820500	16
Orion Range Extender	18
75071800	18

Mobiler Funkempfänger-T

Z00820500



Allgemeine Beschreibung

Der Mobile Funkempfänger-T dient als am Körper tragbare mobile Empfangseinheit zur Verwendung in kleinen, räumlichen Einheiten (z.B. Wohngruppen). Ein eingehender Ruf einer hilferufenden Person wird im Display rot angezeigt, der integrierte Vibrationsgeber und/oder Summer werden aktiviert.

Durch kurzes Drücken der unteren Menütaste wird der Ruf quittiert. Vibration und Summer werden anschließend für ca. 5 Minuten stummgeschaltet. Nach Ablauf dieser Zeit erfolgt automatisch eine erneute Aktivierung, um sicherzustellen, dass der Ruf nicht unbeachtet bleibt.

Unter dem Menüpunkt „Einstellungen/Quittieren“ kann festgelegt werden, dass bei langem Druck (ca. 2 Sekunden) auf die untere Menütaste der Ruf des Senders aus der Rufliste gelöscht wird. Der entsprechende Ruf wird nicht mehr angezeigt, die Vibration und der Summer sind nicht mehr aktiv.

Die zimmergenaue Abstimmung eines Rufes wird über spezielle Abstellsender vorgenommen, die während des Einlernprozesses als solche inklusive Zimmernummer hinterlegt werden. Es werden alle Rufe, auch von verschiedenen Auslösern, im gleichen Zimmer abgestellt.

Beispielsweise ruft ein Patient aus Zimmer 0130. In diesem Fall kann der Ruf von der Pflegekraft quittiert werden oder er kann mittels langen Drückens aus der Rufliste gelöscht werden. Bei einer Quittierung meldet sich der Empfänger nach ca. 5 Minuten wieder. Abgestellt werden alle Rufe aus Zimmer 0130 gleichzeitig mit dem zugeordneten Abstellsender.

Ausstattung und Funktionen

- Ca. 100 Funksender einlernbar
- Funkprotokolle: Tunstall Classic Radio, Lehmann
- Signalisierung optisch, akustisch und Vibration
- Textanzeige von Ruftyp (Ruf, Zimmer, WC) und 4-stelliger Zimmernummer
- OLED-Display inkl. Batteriestandsanzeige
- Wenn die Batterie eines eingelernten Funksenders schwach ist, erscheint innerhalb der roten Rufanzeige der Text „Batterie leer“
- Funkreichweite bis 30 m im Gebäude, bis zu 100 m im Freien

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT):	109 x 59 x 14 mm
Gewicht:	50 g
Schutzart:	IP52
Funkfrequenz:	869,2125 MHz (Sozialalarmfrequenz)
Betriebsspannung:	3,7 V / 1000 mAh
Akkutyp:	Li-Polymer-Akku, 1000 mAh, wechselbar
Betriebsdauer:	20 Stunden
Ladedauer:	135 Minuten

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
Z00820500	Mobiler Funkempfänger-T	
Erforderliches Zubehör:		
Z00820510	Desktop-Ladeschale inkl. Ladekabel für Mobiler Funkempfänger-T	siehe Anhang „Zubehör“
Z00820520	Ladeschale Wandmontage inkl. Ladekabel, für Mobiler Funkempfänger-T	siehe Anhang „Zubehör“
Z00820530	USB-Ladegerät für Ladeschalen für Mobiler Funkempfänger-T	siehe Anhang „Zubehör“

Orion Range Extender

75071800



Allgemeine Beschreibung

Der Orion Range Extender dient dazu, die Signale von Tunstall Telecare-Sensoren (Tunstall Classic Protokoll) zu verstärken und so deren Reichweite deutlich zu erhöhen.

Die Spannungsversorgung des Reichweitenverstärkers erfolgt über ein Steckernetzteil. Durch den integrierten Akku ist im Fall eines Stromausfalls die Notstromversorgung sichergestellt.

Ausstattung und Funktionen

- Erhöhung der Reichweite aller Tunstall Telecare-Sensoren mit Tunstall Classic Protokoll
- Verwendung in Verbindung mit den folgenden Produkten von Tunstall:
 - Alle aktuellen Hausnotrufgeräte
 - Alle Funkempfänger-T und -T UP
 - Mobiler Funkempfänger-T
- Zwei Antennen
- Bis zu 12 Stunden Akkuversorgung bei Stromausfall
- Funksignal bei Stromausfall
- LED- und Tonsignalisierung

Technische Daten

Abmessungen inkl.

Antennen (HxBxT):

255 x 65 x 95 mm

Funkfrequenz:

869,2125 MHz

Reichweite

bis zu 1 km bei freier Sicht^a.

Spannungsversorgung:

230-V-AC-Steckdose

^aDie tatsächliche Abdeckung wird durch Wände, Dämmung, Gebäudeaufbau und andere Hindernisse reduziert. Aus diesem Grund wird vor der Installation dringend ein Standorttest mithilfe der Walk-Test-Funktion empfohlen. Dadurch lassen sich optimale Gerätepositionen, mögliche „Funklöcher“ sowie der Bedarf an Range Extendern ermitteln, damit das System die vorgesehenen Bereiche zuverlässig abdeckt.

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
75071800	Orion Range Extender	

3. Persönliche Funksender, Falldetektoren

Inhalt

Lifeline Pendant - 2-Way Secure	20
P62505/005	20
Lifeline Pendant - Classic AP	22
P62405/002	22
MyAmie, creme/rot	24
P68007/02	24
MyAmie, grau/schwarz	26
P68007/04	26
Vibby Falldetektor 4	28
67605/26	28

Lifeline Pendant - 2-Way Secure

P62505/005



Allgemeine Beschreibung

Der Lifeline Pendant ist die nächste Generation persönlicher Funksender von Tunstall – entwickelt für höchsten Tragekomfort, einfache Bedienung, nachhaltige Nutzung und eine sichere, zuverlässige Kommunikation. Der Lifeline Pendant ist durch sein neutrales, unauffälliges und nicht stigmatisierendes Design angenehm zu tragen. Er eignet sich sowohl für den Einsatz zu Hause als auch in Pflegeeinrichtungen.

Der Lifeline Pendant - 2-Way Secure nutzt das neueste Funkprotokoll von Tunstall. Das 2-Way Secure Connected Radio Protokoll (2-Way Secure) ist ein 2-Wege-Funkprotokoll mit einer sicheren Verschlüsselung.

Ausstattung und Funktionen

- Verwendung in Verbindung mit dem Hausnotrufgerät Lifeline Digital
- 180 mm² Tastenfläche
- Bidirektionale Verbindung zum Lifeline Digital
- Rufauslösung mit zweifacher Bestätigung (rote und grüne LED): Bestätigung, dass das Funksignal gesendet wurde (rote LED) und beim Lifeline Digital angekommen ist (grüne LED)

- Überwachung der Funktionsbereitschaft als Periodischer Link-Test in 2-Wege-Ausführung in Verbindung mit dem Lifeline Digital
- Halskordel
- Stretcharmband, 20 mm breit
- Funkprotokoll Tunstall 2-Way Secure
- Funkreichweite in Verbindung mit dem Lifeline Digital mindestens 30 Meter innerhalb von Gebäuden und mindestens 250 Meter im Freien
- Frequenzsprungverfahren: Bei einer erkannten Störung wird auf eine alternative Funkfrequenz gewechselt.
- Kontrollanzeige und automatische Überwachung der Batterie
- Wenn die Batterie schwach ist, löst das Lifeline Digital automatisch einen Hintergrundruf zur Servicezentrale aus.
- Staubdicht und geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser (IP67)
- Batterie: Lithium-Knopfzelle; CR2450; 3,0 V (von geschultem Fachpersonal wechselbar)
- Batterielebensdauer: Bis zu 5 Jahre oder 30.000 Notrufübertragungen (diese Dauer kann durch Faktoren wie extreme Temperaturen, schwache oder unterbrochene Verbindungen und Batteriealterung verkürzt werden)
- Funkleistung: Die Sendeleistung im tatsächlichen Frequenzband beträgt weniger als 1 mW effektiv abgestrahlte Leistung.

Technische Daten

Abmessungen (H x Ø):	13 x 35 mm (ohne Anbauteile)
Gewicht:	16 g (ohne Anbauteile)
Material des Gehäuseoberteils (Ruftaste):	Silikonkautschuk
Material des Gehäuseunterteils:	ABS

Material der Stretcharmband- und Halskordelhalterung:	TPU	Schutzart:	IP67
Material des Stretcharmbands:	64 % Polyamid, 16 % Elasthan, 20 % Polyester	Funkfrequenzen:	869,2125 MHz und 868,3000 MHz
Material des Verschlusses für das Stretcharmband:	Polyoxymethylen (POM)	Funkprotokoll:	Tunstall 2-Way Secure
Material der Halskordel:	Polyester	Funkverschlüsselung	AES 128-bit
Material des Halskordel-Verschlusses:	Nylon	Umgebungstemperatur Betrieb:	+5 °C bis +40 °C (empfohlen)

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
P62505/005	Lifeline Pendant - 2-Way Secure	Artikel-Nummer auf dem Typenschild des Gerätes: 62505/005
Ersatzteile:		
62505/011	Batterie-Servicekit	siehe Anhang „Zubehör“

Lifeline Pendant - Classic AP

P62405/002



Allgemeine Beschreibung

Der Lifeline Pendant ist die nächste Generation persönlicher Funksender von Tunstall – entwickelt für höchsten Tragekomfort, einfache Bedienung, nachhaltige Nutzung und eine sichere, zuverlässige Kommunikation. Der Lifeline Pendant ist durch sein neutrales, unauffälliges und nicht stigmatisierendes Design angenehm zu tragen. Er eignet sich sowohl für den Einsatz zu Hause als auch in Pflegeeinrichtungen.

Der Lifeline Pendant - Classic AP nutzt das Funkprotokoll Classic AP von Tunstall.

Ausstattung und Funktionen

- Verwendung in Verbindung mit den folgenden Produkten von Tunstall:
 - Hausnotrufgeräte: Lifeline Digital, Lifeline Smart Hub, Lifeline-Vi-Modelle, Lifeline Vi+, Lifeline GSM
 - Alle Funkempfänger-T und -T UP
 - Mobiler Funkempfänger-T
- 180 mm² Tastenfläche
- Unidirektionale Verbindung zum Hausnotrufgerät oder Funkempfänger
- Rufauslösung mit Bestätigung, dass das Funksignal gesendet wurde (rote LED)

- Überwachung der Funktionsbereitschaft als Periodischer Link-Test in 1-Weg-Ausführung (= Funkstreckenüberwachung) in Verbindung mit einem Hausnotrufgerät
- Halskordel
- Stretcharmband, 20 mm breit
- Funkprotokoll Tunstall Classic AP
- Funkreichweite in Verbindung mit Hausnotrufgeräten mindestens 30 Meter innerhalb von Gebäuden und mindestens 250 Meter im Freien
- Funkreichweite in Verbindung mit Funkempfängern-T, -T UP und dem Mobilten Funkempfänger-T bis zu 30 Meter innerhalb von Gebäuden
- Kontrollanzeige und automatische Überwachung der Batterie
 - Wenn die Batterie schwach ist:
 - Das Hausnotrufgerät löst automatisch einen Hintergrundruf zur Servicezentrale aus.
 - Die LED am Funkempfänger-T und -T UP blinkt rot.
 - Das Display des Mobilten Funkempfängers-T zeigt „Batterie leer“ an.
- Staubdicht und geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser (IP67)
- Batterie: Lithium-Knopfzelle; CR2450; 3,0 V (von geschultem Fachpersonal wechselbar)
- Batterie Lebensdauer: Bis zu 5 Jahre oder 30.000 Notrufübertragungen (diese Dauer kann durch Faktoren wie extreme Temperaturen, schwache oder unterbrochene Verbindungen und Batteriealterung verkürzt werden)
- Funkleistung: Die Sendeleistung im tatsächlichen Frequenzband beträgt weniger als 1 mW effektiv abgestrahlte Leistung.

Technische Daten

Abmessungen (H x Ø):	13 x 35 mm (ohne Anbauteile)
Gewicht:	16 g (ohne Anbauteile)
Material des Gehäuseoberteils (Ruftaste):	Silikonkautschuk

Material des Gehäuseunterteils:	ABS	Material der Halskordel:	Polyester
Material der Stretcharmband- und Halskordelhalterung:	TPU	Material des Halskordel-Verschlusses:	Nylon
Material des Stretcharmbands:	64 % Polyamid, 16 % Elasthan, 20 % Polyester	Schutzart:	IP67
Material des Verschlusses für das Stretcharmband:	Polyoxymethylen (POM)	Funkfrequenz:	869,2125 MHz
		Funkprotokoll:	Tunstall Classic AP
		Umgebungstemperatur Betrieb:	+5 °C bis +40 °C (empfohlen)

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
P62405/002	Lifeline Pendant - Classic AP	Artikel-Nummer auf dem Typenschild des Gerätes: 62405/002
Ersatzteile:		
62505/011	Batterie-Servicekit	siehe Anhang „Zubehör“

MyAmie, creme/rot

P68007/02



(Abbildung ähnlich)

Allgemeine Beschreibung

Ein kleiner, wasserdichter Funksender mit Funkstreckenüberwachung, der zur drahtlosen Auslösung von Notrufen dient. Er ist leicht und kann auf unterschiedliche Arten getragen werden. Ausgeliefert wird der MyAmie mit einem Stretcharmband und einer Halskordel.

HINWEIS! Bei Verwendung des Funksenders in Rufanlagen, d.h. zugeordnet zu Funkempfänger-T und -T UP, nennt man die ausgelöste Rufart nicht „Notruf“ sondern „Ruf“.

Ausstattung und Funktionen

- Verwendung in Verbindung mit den folgenden Produkten von Tunstall:
 - Alle aktuellen Hausnotrufgeräte
 - Alle Funkempfänger-T und -T UP
 - Mobiler Funkempfänger-T
- Rote Ruftaste
- LED-Auslöseanzeige leuchtet rot bei Betätigung der roten Ruftaste
- Halskordel
- Stretcharmband, 20 mm breit
- Funkstreckenüberwachung
- Funkprotokoll Tunstall Classic AP

- Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur:
 - In Verbindung mit Hausnotrufgerät bis zu 50 m
 - In Verbindung mit Funkempfänger-T und -T UP bis zu 30 m
 - In Verbindung mit Mobilem Funkempfänger-T bis zu 30 m
- Kontrollanzeige und automatische Überwachung der Batterie
- Wenn die Batterie schwach ist:
 - Das Hausnotrufgerät löst automatisch einen Hintergrundruf zur Servicezentrale aus.
 - Die LED am Funkempfänger-T und -T UP blinkt rot.
 - Das Display des Mobilen Funkempfängers-T zeigt „Batterie leer“ an.
- Staubdicht und geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser (IP67)
- Langlebige Materialbeständigkeit durch den Einsatz von dem Hochleistungskunststoff Hytrel®.
- Batterie: Lithium-Knopfzelle; CR2032; 3,0 V (nicht wechselbar)
- Batterielebensdauer: Bis zu 7 Jahre (diese Dauer kann durch Faktoren wie extreme Temperaturen, schwache oder unterbrochene Verbindungen und Batteriealterung verkürzt werden)
- Funkleistung: Die Sendeleistung im tatsächlichen Frequenzband beträgt weniger als 1 mW effektiv abgestrahlte Leistung.

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT):	14 x 27 x 36 mm
Gewicht:	7 g Nettogewicht (ohne Anbauteile)
Gehäusematerial:	ABS
Material der Ruftaste:	Hytrel®
Material des Stretcharmbands:	Polyester/Elastic
Material des Verschlusses für das Stretcharmband:	ABS
Gehäusefarbe:	Cremeweiß
Farbe der Ruftaste:	Rot

Schutzart:	IP67	Umgebungstemperatur	
Funkfrequenz:	869,2125 MHz	Lagerung/Transport:	-10 °C bis +50 °C
Umgebungstemperatur			
Betrieb:	0 °C bis +45 °C		

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
P68007/02	MyAmie, creme/rot	Modell-Nummer (= Nummer auf dem Etikett des MyAmie): 68005/02
Optionales Zubehör:		
D6702112	EasyPress Adapter MyAmie, Verpackungseinheit 1 Stück	siehe Anhang „Zubehör“
D6702128	Schlüsselring MyAmie, Verpackungseinheit 1 Stück	siehe Anhang „Zubehör“
D6702135	Stretcharmband (10 mm) MyAmie, Verpackungseinheit 10 Stück	siehe Anhang „Zubehör“
D6702136	Gürtelklipp MyAmie, Verpackungseinheit 10 Stück	siehe Anhang „Zubehör“
Ersatzteile:		
D6702178	Halskordel MyAmie, weiß, Verpackungseinheit 10 Stück	siehe Anhang „Zubehör“
D6702145	Stretcharmband (20 mm) MyAmie, Verpackungseinheit 10 Stück	siehe Anhang „Zubehör“

MyAmie, grau/schwarz

P68007/04



Allgemeine Beschreibung

Ein kleiner, wasserdichter Funksender mit Funkstreckenüberwachung, der zur drahtlosen Auslösung von Notrufen dient. Er ist leicht und kann auf unterschiedliche Arten getragen werden. Ausgeliefert wird der MyAmie mit einem Stretcharmband und einer Halskordel.

HINWEIS! Bei Verwendung des Funksenders in Rufanlagen, d.h. zugeordnet zu Funkempfänger-T und -T UP, nennt man die ausgelöste Rufart nicht „Notruf“ sondern „Ruf“.

Ausstattung und Funktionen

- Verwendung in Verbindung mit den folgenden Produkten von Tunstall:
 - Alle aktuellen Hausnotrufgeräte
 - Alle Funkempfänger-T und -T UP
 - Mobiler Funkempfänger-T
- Schwarze Ruftaste
- LED-Auslöseanzeige leuchtet rot bei Betätigung der schwarzen Ruftaste
- Halskordel
- Stretcharmband, 20 mm breit
- Funkstreckenüberwachung
- Funkprotokoll Tunstall Classic Radio

- Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur:
 - In Verbindung mit Hausnotrufgerät bis zu 50 m
 - In Verbindung mit Funkempfänger-T und -T UP bis zu 30 m
 - In Verbindung mit Mobilem Funkempfänger-T bis zu 30 m
- Kontrollanzeige und automatische Überwachung der Batterie
- Wenn die Batterie schwach ist:
 - Das Hausnotrufgerät löst automatisch einen Hintergrundruf zur Servicezentrale aus.
 - Die LED am Funkempfänger-T und -T UP blinkt rot.
 - Das Display des Mobilen Funkempfängers-T zeigt „Batterie leer“ an.
- Staubdicht und geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser (IP67)
- Langlebige Materialbeständigkeit durch den Einsatz von dem Hochleistungskunststoff Hytrel®.
- Batterie: Lithium-Knopfzelle; CR2032; 3,0 V (nicht wechselbar)
- Batterielebensdauer: Bis zu 7 Jahre (diese Dauer kann durch Faktoren wie extreme Temperaturen, schwache oder unterbrochene Verbindungen und Batteriealterung verkürzt werden)
- Funkleistung: Die Sendeleistung im tatsächlichen Frequenzband beträgt weniger als 1 mW effektiv abgestrahlte Leistung.

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT):	14 x 27 x 36 mm
Gewicht:	7 g Nettogewicht (ohne Anbauteile)
Gehäusematerial:	ABS
Material der Ruftaste:	Hytrel®
Material des Stretcharmbands:	Polyester/Elastic
Material des Verschlusses für das Stretcharmband:	ABS
Gehäusefarbe:	Grau
Farbe der Ruftaste:	Schwarz

Schutzart:	IP67	Umgebungstemperatur	
Funkfrequenz:	869,2125 MHz	Lagerung/Transport:	-10 °C bis +50 °C
Umgebungstemperatur			
Betrieb:	0 °C bis +45 °C		

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
P68007/04	MyAmie, grau/schwarz	Modell-Nummer (= Nummer auf dem Etikett des MyAmie): 68005/04
Optionales Zubehör:		
D6702112	EasyPress Adapter MyAmie, Verpackungseinheit 1 Stück	siehe Anhang „Zubehör“
D6702128	Schlüsselring MyAmie, Verpackungseinheit 1 Stück	siehe Anhang „Zubehör“
D6702135	Stretcharmband (10 mm) MyAmie, Verpackungseinheit 10 Stück	siehe Anhang „Zubehör“
D6702136	Gürtelklipp MyAmie, Verpackungseinheit 10 Stück	siehe Anhang „Zubehör“
Ersatzteile:		
D6702178	Halskordel MyAmie, weiß, Verpackungseinheit 10 Stück	siehe Anhang „Zubehör“
D6702145	Stretcharmband (20 mm) MyAmie, Verpackungseinheit 10 Stück	siehe Anhang „Zubehör“

Vibby Falldetektor 4

67605/26



Allgemeine Beschreibung

Der Vibby dient zur automatischen Auslösung von Notrufen bei schweren gefährlichen Stürzen. Zusätzlich verfügt er über eine Ruftaste, durch die eine manuelle Notrufauslösung möglich ist.

20 Sekunden bevor der Vibby einen Notruf nach Sturzerkennung auslöst, vibriert der Vibby. Das gibt der Benutzerin oder dem Benutzer die Möglichkeit, einen Fehlalarm zu verhindern, indem sie bzw. er einfach den Vibby für 2 Sekunden mit der Hand abdeckt.

Der Vibby wird wie eine Armbanduhr am Handgelenk getragen. Optional kann er mit einer Halskordel um den Hals getragen werden.

Hinweis: Weiche Stürze, Heruntersinken, Herunterrutschen an der Wand oder in einem Stuhl werden von dem Vibby nicht als Sturz erkannt.

Ausstattung und Funktionen

- In Verbindung mit allen aktuellen Hausnotrufgeräten von Tunstall
- Automatische Rufauslösung bei schweren Stürzen
- Vibration vor Alarmauslösung zur Verhinderung von Fehlalarmen

- Integrierte Ruftaste zur manuellen Auslösung eines Notrufes
- Rote LED leuchtet auf und Gerät vibriert, wenn ein Notruf ausgelöst wird
- Bei dem Notrufempfänger (Servicezentrale) Anzeige von unterschiedlichen Rufarten für Sturz und manuelle Rufauslösung
- Möglichkeit zum Abstellen des Sturznotrufes durch die Benutzerin bzw. den Benutzer, indem sie bzw. er den Vibby für 2 Sekunden mit der Hand abdeckt, bei Fehlalarm.
- Ergonomisches Design
- Gehäuse aus hypoallergenem Kunststoff
- Kunststoffarmband vorinstalliert und als Trageoption vorkonfiguriert
- Halskordel im Lieferumfang
- Wechselbare Lithium-Batterie
- Automatischer Hintergrundruf zur Servicezentrale, wenn die Batterie schwach ist
- Staubdicht und geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser (IP 67)
- Funkprotokoll Tunstall Classic Radio
- Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur, 300 m im freien Feld

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT):	37 x 34 x 13 mm
Gewicht:	35 g
Funkfrequenz:	869,2125 MHz
Batterie:	Li-Batterie (CR2477 / LiMnO ₂)
Batterielebensdauer:	Abhängig von der Nutzung bis zu 2 Jahre
Betriebstemperatur:	+5°C bis +40°C

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
67605/26	Vibby Falldetektor 4	
Zubehör und Ersatzteile, bei Bedarf bestellen:		
D6656001A	Batteriewechsel-Tool Vibby	Für Batteriewechsel benötigt.
D6654020A	Batterie-Dichtungsring Vibby	Bei jedem Batteriewechsel muss auch der Dichtungsring ersetzt werden.
D6652001A	Halskordel (schwarz) Vibby	
D6654001A	Armband (schwarz) Vibby	
S1004048	Batterie CR2477 Vibby, Hersteller Panasonic	

4. Funkzubehör

Inhalt

Funk-Zugtaster-T UP	31
Z00820295	31
Funk-Ruftaster-T	33
Z00820280	33
Großflächen-Funk-Pneumatiktaster	34
Z00820115	34
Bewegungsmelder	35
62505/035	35
Vernetzter Rauchwarnmelder	37
1423801	37
Raumtemperaturmelder	38
61005/40	38
Nexa Smart Plug	39
92199/157	39
Universalsensor	40
62505/030	40
Funk-Sensormatte 869 MHz	43
Z00800201	43
Funk-Trittsensormatte CM	44
Z00800301	44
Funk-Trittsensormatte NM	45
Z00800302	45
Blitzlicht-Empfänger	46
75071603	46
Telefonsender	47
75071602	47
Türklingel-Signalsender	48
75071605	48
ambiact T1	49
75071402	49
Funk-Blitzalarm-T	51
Z00820271	51
Funk-Steckdose-T	52
Z00820270	52

Funk-Zugtaster-T UP

Z00820295



Allgemeine Beschreibung

Funk-Zugtaster für Wand- und Deckenmontage.

Intelligente Batterieüberwachung mit Störungsmeldung an zugehörigen Empfänger.

Unterputzmontage. Aufputzmontage mit Aufputz-Kappe, Artikel-Nr. 19920016 (separat zu bestellen).

Optische Funktions-Beruhigungsanzeige.

Zugschnur variabel bis 2,5 m Länge.

Strangulationsschutz durch Sicherheitsverschluss, der sich bei zu starker Zugkraft öffnet.

Ausstattung und Funktionen

- Verwendung in Verbindung mit den folgenden Produkten von Tunstall:
 - Alle aktuellen Hausnotrufgeräte
 - Alle Funkempfänger-T und -T UP
 - Mobiler Funkempfänger-T

- 2,5 m lange, rote Zugschnur mit rotem Rufgriff (Triangel) und Sicherheitsverschluss
- Sicherheitsverschluss öffnet bei zu starker Zugkraft
- Eindeutige Kennzeichnung durch Symbol
- Bei Rufauslösung leuchtet die LED auf
- Funkprotokoll Tunstall Classic Radio
- Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur:
 - In Verbindung mit Hausnotrufgerät bis zu 50 m
 - In Verbindung mit Funkempfänger-T und -T UP bis zu 30 m
 - In Verbindung mit Mobilem Funkempfänger-T bis zu 30 m
- Wenn die Batterie schwach ist:
 - Das Hausnotrufgerät löst automatisch einen Hintergrundruf zur Servicezentrale aus.
 - Die LED am Funkempfänger-T und -T UP blinkt rot.
 - Das Display des Mobilen Funkempfängers-T zeigt „Batterie leer“ an.
- 3-V-Lithium-Batterie (CR2032), wechselbar
- Zentralplatte 55 x 55 mm im Lieferumfang
- Rahmen Jung AS 500 im Lieferumfang (Art.-Nr. des Herstellers: AS 581 WW)
- Passend für einteilige Einbaudose

Technische Daten

Abmessungen

(HxBxT): 81 x 81 x 42 mm

Farbe: Alpinweiß

Gewicht: ca. 100 g

Schutzart: IP44

Funkfrequenz: 869,2125 MHz

Batterie: Art: CR2032, Spannung: 3 V, chem. System: Lithium-Mangandioxid

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
Z00820295	Funk-Zugtaster-T UP	
Erforderliches Zubehör:		
17010000	Einbaudose Mauerwerk, 1-teilig	siehe Anhang „Zubehör“
17510000	Einbaudose Hohlwand, 1-teilig	siehe Anhang „Zubehör“
Optionales Zubehör:		
19920016	Aufputz-Kappe, 1-fach, alpinweiß	siehe Anhang „Zubehör“
Z00820297	Wechselträger-Set für Aufputz-Kappe, 1-fach	siehe Anhang „Zubehör“
Z00820298	Wandhalterung für Wechselträger	siehe Anhang „Zubehör“

Funk-Ruftaster-T

Z00820280



Allgemeine Beschreibung

Funk-Ruftaster zur Auslösung eines Rufes durch Drücken der großflächigen roten Ruftaste. Wenn die Ruftaste gedrückt wird, sendet er ein Funksignal an das zugeordnete Tunstall-Notrufgerät.

Die rote Ruftaste mit Symbol leuchtet Rot bei Rufauslösung.

Die geringe Gerätetiefe von 13 mm ermöglicht eine leichte Aufputzmontage (auch unter Verwendung von Klebepads).

Ausstattung und Funktionen

- Verwendung in Verbindung mit den folgenden Produkten von Tunstall:
 - Alle aktuellen Hausnotrufgeräte
 - Alle Funkempfänger-T und -T UP
 - Mobiler Funkempfänger-T

- Funkprotokoll Tunstall Classic Radio
- Großflächige Ruftaste
- LED-Anzeige für Ruf und Batteriemeldung
- Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur:
 - In Verbindung mit Hausnotrufgerät bis zu 50 m
 - In Verbindung mit Funkempfänger-T und -T UP bis zu 30 m
 - In Verbindung mit Mobilem Funkempfänger-T bis zu 30 m
- Batterie-Betriebsdauer bei täglich einmaligem Gebrauch ca. 3 Jahre
- Wenn die Batterie schwach ist:
 - Das Hausnotrufgerät löst automatisch einen Hintergrundruf zur Servicezentrale aus.
 - Die LED am Funkempfänger-T und -T UP blinkt rot.
 - Das Display des Mobilen Funkempfängers-T zeigt „Batterie leer“ an.
- Wandmontage
- Für die Wandmontage im Lieferumfang: 2 Schrauben 3,5 x 35 mm, 2 Dübel 5 x 28 mm

Technische Daten

Abmessungen

(HxBxT): 80 x 80 x 13 mm

Gewicht: ca. 70 g

Schutzart: IP67

Funkfrequenz: 869,2125 MHz

Batterie: Art: CR2032, Spannung: 3 V, chem. System: Lithium-Mangandioxid

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
Z00820280	Funk-Ruftaster-T	

Großflächen-Funk-Pneumatiktaster

Z00820115



Allgemeine Beschreibung

Drahtloser Großflächen-Pneumatiktaster. Es wird nur eine sehr geringe Betätigungskraft benötigt, um den Taster zu aktivieren. Deshalb eignet er sich gut bei krankheitsbedingten Aktivierungsbehinderungen.

Ausstattung und Funktionen

- Verwendung in Verbindung mit den folgenden Produkten von Tunstall:
 - Alle aktuellen Hausnotrufgeräte
 - Alle Funkempfänger-T und -T UP
 - Mobiler Funkempfänger-T
- Rote Auslösefläche, rund, Ø 90 mm
- Bei Auslösung rundum leuchtende optische Beruhigungsanzeige und Vibration (Vibrationsfunktion deaktivierbar)

- Funkprotokoll Tunstall Classic Radio
- Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur:
 - In Verbindung mit Hausnotrufgerät bis zu 50 m
 - In Verbindung mit Funkempfänger-T und -T UP bis zu 30 m
 - In Verbindung mit Mobilem Funkempfänger-T bis zu 30 m
- Wenn die Batterie schwach ist:
 - Das Hausnotrufgerät löst automatisch einen Hintergrundruf zur Servicezentrale aus.
 - Die LED am Funkempfänger-T und -T UP blinkt rot.
 - Das Display des Mobilen Funkempfängers-T zeigt „Batterie leer“ an.
- Schutzart: IP44 (nicht in Nasszellen verwenden)
- 3-V-Batterie (CR2450), wechselbar

Technische Daten

Abmessungen (HxØ):	40 x 110 mm
Durchmesser der Druckfläche:	90 mm
Material des Balgs:	TPE/TPR
Gewicht:	200 g
Farbe:	Rot
Batterie:	3-V-Batterie (CR2450)
Funkfrequenz:	869,2125 MHz
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +55 °C

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
Z00820115	Großflächen-Funk-Pneumatiktaster	
Optionales Zubehör:		
Z00820116	Wandhalterung für Großflächen-Pneumatiktaster	siehe Anhang „Zubehör“

Bewegungsmelder

62505/035



Allgemeine Beschreibung

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit Kleintierunterdrückung für den Innenbereich. Wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wird, sendet er ein Funksignal an das zugeordnete Notrufgerät.

Der Bewegungsmelder wurde speziell für Pflegeanwendungen entwickelt, bei denen es wichtig ist, dass Inaktivität auch dann erkannt wird, wenn sich die Benutzerin oder der Benutzer auf dem Boden befindet und noch kleine Bewegungen ausführt („Fallzonen-Funktion“).

Der Bewegungsmelder kann zum Beispiel als Aktivitätssensor für die Aktivitätsfunktion mit Hausnotrufgeräten eingesetzt werden.

Bei entsprechender Konfiguration des verbundenen Tunstall-Systems kann der Bewegungsmelder zur direkten Rufauslösung verwendet werden.

Ausstattung und Funktionen

- Verwendung in Verbindung mit den folgenden Produkten von Tunstall:
 - Alle aktuellen Hausnotrufgeräte
 - Alle Funkempfänger-T und -T UP
 - Mobiler Funkempfänger-T
- Funkprotokolle: Tunstall 2-Way Secure Connected Radio, Tunstall Classic Radio
- Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur:
 - In Verbindung mit Hausnotrufgerät mindestens 30 m im Innenbereich
 - In Verbindung mit Funkempfänger-T und -T UP bis zu 30 m im Innenbereich
 - In Verbindung mit Mobilem Funkempfänger-T bis zu 30 m im Innenbereich
- Erfassungsbereich: 5 m x 5 m
- Montagehöhe: 1,0 – 1,5 m
- Testfunktion für die Installation, um den Infrarot-Deckungsbereich zu ermitteln
- Fallzonen-Funktion: Kleine Bewegungen unterhalb einer bestimmten Höhe werden nicht registriert
- Batteriebetrieb - keine Verdrahtung
- Batterie leicht wechselbar
- Lebensdauer der Batterie bis zu 3 Jahre, hängt auch von der Anzahl Funkmeldungen ab
- Bewegungsdetektion alle 30 Sekunden
- Wenn die Batterie schwach ist:
 - Das Hausnotrufgerät löst automatisch einen Hintergrundruf zur Servicezentrale aus.
 - Die LED am Funkempfänger-T und -T UP blinkt rot.
 - Das Display des Mobilen Funkempfängers-T zeigt „Batterie leer“ an.
- Funkstreckenüberwachung aktivierbar
- Wandmontage an der flachen Wand oder in der Raumecke
- Schraubmontage oder Montage mit Klettverschluss

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT): 102 x 49 x 23 mm
Gewicht: 72 g
Batterie: Lithium-Batterie, 3,6 V, AA, ER14505V

Funkfrequenz: 869,2125 MHz
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 °C bis +45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung/Transport: -10 °C bis +50 °C

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
62505/035	Bewegungsmelder	
Optionales Zubehör:		
346300483	Bewegungsmelder-Standhalter	siehe Anhang „Zubehör“

Vernetzter Rauchwarnmelder

1423801



Allgemeine Beschreibung

Batteriebetriebener, vernetzbarer Funk-Rauchwarnmelder zur drahtlosen Auslösung von Notrufen bei Rauchentwicklung in Verbindung mit einem Tunstall Notrufgerät. Der Rauchwarnmelder überträgt den Rauchalarm per Funk an das zugeordnete Notrufgerät und gibt parallel dazu einen akustischen Alarm ab (Signalton und Sprachansage).

Bis zu 15 Rauchwarnmelder können per Funk untereinander vernetzt werden. Wenn ein Rauchwarnmelder Rauch erkennt und einen Alarm auslöst, werden Funksignale an die anderen Rauchwarnmelder gesendet, und alle Rauchwarnmelder ertönen.

Ausstattung und Funktionen

- Verwendung in Verbindung mit allen aktuellen Hausnotrufgeräten von Tunstall
- Rauchererkennung nach dem Streulichtprinzip (foto-optischer Rauchwarnmelder)
- Orientierungslicht (LED) am Gerät im Alarmfall, um die Evakuierung zu erleichtern

- Sprachalarm gibt Hinweis auf die Art der Gefahr und den Gefahrenort
- Schutzklasse: EN 14604:2005
- Anzeigen: Rote und grüne LED
- Wartungsintervall: 1 Jahr
- Abstand der Befestigungslöcher am Sockel: 60,0 – 66,7 mm
- Funkprotokolle: Tunstall 2-Way Secure Connected Radio, Tunstall Classic Radio
- Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur
- Funkreichweite zu Hausnotrufgerät: Typisch 100 m im Freien

Technische Daten

Abmessungen (HxØ):	31 x 100 mm
Gewicht (inkl. Sockel):	126 g
Gehäusematerial:	ABS
Gehäusefarbe:	weiß
Signalton:	>85 dB(A)/3m
Max. überwachter Bereich:	50 m²
Batterie:	3 V Lithium-Batterie
Durchschn. Lebensdauer der Batterie bei 15 – 20 °C:	10 Jahre
Durchschn. Lebensdauer des Rauchwarnmelders:	10 Jahre
Funkfrequenz zum Hausnotrufgerät:	869,2125 MHz
Funkfrequenz für die Vernetzung:	868,450 MHz



Installationsanleitung

Vernetzter Rauchwarnmelder
(Artikel-Nr. 1423801)

<https://www.tunstall.de/siteassets/de-technical-documentation/00880477.pdf>

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
1423801	Vernetzter Rauchwarnmelder	

Raumtemperaturmelder

61005/40



Allgemeine Beschreibung

Raumtemperaturmelder zur Überwachung und Aufrechterhaltung einer gesunden Temperatur im Haus. Er unterstützt das unabhängige Wohnen, indem er dabei hilft, dass die Raumtemperatur in einem vorgegebenen Bereich bleibt. Abweichungen von dieser Temperatur meldet der Raumtemperaturmelder an das zugeordnete Notrufgerät.

Der kabellose, wandmontierte Funksensor überwacht eine hohe und eine niedrige Temperaturschwelle. Die Temperaturschwellen werden über das LCD-Display und ein einfaches Konfigurationsmenü festgelegt.

Ausstattung und Funktionen

- In Verbindung mit allen aktuellen Hausnotrufgeräten von Tunstall
- Alarm bei hoher Temperatur, wenn die Temperatur länger als 5 Minuten oberhalb des eingestellten oberen Grenzwertes liegt

- Alarm bei niedriger Temperatur, wenn die Temperatur länger als 5 Minuten unterhalb des eingestellten unteren Grenzwertes liegt
- Oberer Grenzwert einstellbar zwischen 25° C und 50° C
- Niedriger Grenzwert einstellbar zwischen 0° C und 24° C
- Dauerhaft Anzeige der aktuellen Temperatur (deaktivierbar)
- Funkprotokoll Tunstall Classic Radio
- Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur bis zu 50 m
- Vier Tasten und LCD-Display zur einfachen Konfiguration
- Batteriebetrieb
- Voraussichtliche Lebensdauer der wechselbaren Batterie ca. 5 Jahre unter normalen Bedingungen
- Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur; in Verbindung mit Hausnotrufgerät bis zu 50 m
- Wenn die Batterie schwach ist: Das Hausnotrufgerät löst automatisch einen Hintergrundruf zur Servicezentrale aus.

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT):	80 x 50 x 25 mm
Gewicht (inkl. Batterie):	70 g
Gehäusefarbe:	Weiß
Batterietyp:	AA 3,6 V
Funkfrequenz:	869,2125 MHz
Umgebungstemperatur::	
• Betrieb:	0 °C bis +45 °C
• Lagerung, Transport:	-10 °C bis +50 °C

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
61005/40	Raumtemperaturmelder	

Nexa Smart Plug

92199/157



Allgemeine Beschreibung

Der Nexa Smart Plug ist ein intelligenter Steckdosenadapter, der ermöglicht, dass Geräte im Haushalt per Funkfernsteuerung durch das Lifeline Digital ein- und ausgeschaltet werden können.

Der Nexa Smart Plug wird zwischen das Gerät und die 230-V-Steckdose gesteckt. Die Ereignisse, bei denen das Lifeline Digital das angeschlossene Gerät ein- oder ausschalten soll, werden komfortabel in der DMP konfiguriert.

Typische Anwendungen: TV-Gerät ausschalten, wenn ein Notruf ausgelöst wird, damit eine ungestörte Sprechverbindung für die Notrufbearbeitung möglich ist. Eine Lampe einschalten, wenn eine Person das Bett verlässt.

Die Ansteuerung des Nexa Smart Plug durch das Lifeline Digital erfolgt über das Frequenzband 433,92 MHz (Nexa System).

Ausstattung und Funktionen

- Verwendung in Verbindung mit Lifeline Digital
- Funkreichweite abhängig von den räumlichen Gegebenheiten bis zu 30 m
- Leistungsaufnahme des angeschlossenen Gerätes: max. 3500 Watt
- LED zur Statusanzeige des Gerätes
- Ein-/Aus-Schalter am Gerät zum manuellen Ein- und Ausschalten des angeschlossenen Gerätes
- Ansteuerung unabhängig vom Lifeline Digital mit der App Nexa Bridge möglich

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT):	53 x 53 x 58 mm
Schaltertyp:	Relais
Spannungsversorgung:	220 – 240 V~, 50 Hz
Max. Last:	3500 W RL
Funkfrequenz:	433,92 MHz (System Nexa)
Funkreichweite:	bis zu 30 m
Standby-Leistungsaufnahme:	< 1 W
Schutzart:	Verwendung in Innenräumen

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
92199/157	Nexa Smart Plug	

Universalsensor

62505/030



Allgemeine Beschreibung

Universeller Sensor zur Verwendung in Verbindung mit den folgenden Produkten von Tunstall:

- Alle aktuellen Hausnotrufgeräte
- Alle Funkempfänger-T und -T UP
- Mobiler Funkempfänger-T

Verfügbare Betriebsarten:

- Weiterleitung der Alarmmeldungen von drahtgebundenen Telecare-Sensoren
- Nutzung als Türwächter zur Rufauslösung
- Nutzung als Türkontakt zur Ereignismeldung
- Nutzung als Belegungssensor zur Rufauslösung
- Nutzung als virtueller Bettsensor zur Ereignismeldung

Die Konfiguration des Universalsensors für die gewünschte Betriebsart erfolgt über vier Tasten und ein LCD-Display.

Basis-Eigenschaften

- Funkprotokolle: Tunstall 2-Way Secure Connected Radio, Tunstall Classic Radio

- Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur:
 - In Verbindung mit Hausnotrufgerät mindestens 30 m im Innenbereich
 - In Verbindung mit Funkempfänger-T und -T UP bis zu 30 m im Innenbereich
 - In Verbindung mit Mobilem Funkempfänger-T bis zu 30 m im Innenbereich
- Vier Tasten und LCD-Display zur einfachen Konfiguration
- Batteriebetrieb
- Wenn die Batterie des Universalsensors schwach ist:
 - Das Hausnotrufgerät löst automatisch einen Hintergrundruf zur Servicezentrale aus.
 - Die LED am Funkempfänger-T und -T UP blinkt rot.
 - Das Display des Mobilen Funkempfängers-T zeigt „Batterie leer“ an.
- Lebensdauer der wechselbaren Batterie bis zu 5 Jahre abhängig von der Nutzung.

Weiterleitung der Alarmmeldungen von drahtgebundenen Telecare-Sensoren

- Nutzung der Betriebsart in Verbindung mit Hausnotrufgeräten, Funkempfänger-T und -T UP, Mobilem Funkempfänger-T
- Öffner- oder Schließer-Kontakt (potentialfrei) anschließbar
- Anschluss an die freien Kabelenden der 195 cm langen Anschlussleitung mit RJ11-Stecker. Optional Anschluss an die 3,5 mm-Klinkenbuchse
- Der Universalsensor kann folgende Rufarten an Hausnotrufgeräte weiterleiten:
 - CO-Melder
 - Enuresis-Sensor
 - Gasdetektor
 - Handsender
 - Rauchwarnmelder
- ACHTUNG! Funkempfänger-T und -T UP leiten Rufe des Universalsensors ohne Angabe der Rufart weiter. Die angezeigte Rufart in der Rufanlage hängt von der Einstellung der Rufanlage ab.

- ACHTUNG! Der Mobile Funkempfänger zeigt die Rufart nicht an. Er zeigt nur den Rufort an, d.h. die Zimmer-Nr. und bei Bedarf ergänzt um die Angabe „Bett“ oder „WC“.
- Zuordnung des Universalsensors mit der eingestellten Rufart zu Hausnotrufgerät per Plug&Play

Nutzung als Türwächter zur Rufauslösung

- Verwendung mit Hausnotrufgeräten, Funkempfänger-T, -T UP und Mobiler Funkempfänger-T
- Verwendung des Magnetkontakts im Lieferumfang des Universalsensors und Anschluss an RJ11-Eingang.
- Auslösertyp mit Lifeline Digital: Abwesenheitssensor, gemeldetes Ereignis: Tür offen.

Nutzung als Türkontakt zur Ereignismeldung

- Verwendung mit Lifeline Vi+ für virtuellen Abwesenheitssensor
- Keine Verwendung mit Lifeline Digital, Lifeline Vi, Lifeline GSM, alle Funkempfänger-T und -T UP, Mobiler Funkempfänger-T
- Verwendung des Magnetkontakts im Lieferumfang des Universalsensors und/oder des eingebauten Reedkontakts im Universalsensor.
- Ereignismeldung „Tür geöffnet“, wenn die Tür geöffnet wurde. Keine Notrufauslösung.
- Ereignismeldung „Tür geschlossen“, wenn die Tür geschlossen wurde. Keine Notrufauslösung.

Nutzung als Belegungssensor zur Rufauslösung

- Verwendung mit Hausnotrufgeräten, Funkempfänger-T, -T UP und Mobiler Funkempfänger-T
- Bettsensormatte oder Stuhlsensormatte als Zubehör erforderlich
- Anschluss der Sensormatte an RJ11-Buchse des Universalsensors
- Notruf, wenn die Benutzerin oder der Benutzer das Bett/den Stuhl während eines Überwachungszeitraums (z.B. nachts) verlassen hat und nicht innerhalb einer vorkonfigurierten Abwesenheitszeit zurückgekehrt ist.

- Notruf, wenn die Benutzerin oder der Benutzer bis zu einer bestimmten Zeit nicht ins Bett gegangen ist.
- Notruf, wenn die Benutzerin oder der Benutzer bis zu einer bestimmten Zeit nicht aus dem Bett aufgestanden ist.
- ACHTUNG! Funkempfänger-T und -T UP leiten Rufe des Universalsensors ohne Angabe der Rufart weiter. Die angezeigte Rufart in der Rufanlage hängt von der Einstellung der Rufanlage ab.
- ACHTUNG! Der Mobile Funkempfänger zeigt die Rufart nicht an. Er zeigt nur den Rufort an, d.h. die Zimmer-Nr. und bei Bedarf ergänzt um die Angabe „Bett“ oder „WC“.

Nutzung als virtueller Bettsensor zur Ereignismeldung

- Verwendung mit Lifeline Vi+ für virtuellen Belegungssensor
- Keine Verwendung mit Lifeline Digital, Lifeline Vi, Lifeline GSM, alle Funkempfänger-T und -T UP, Mobiler Funkempfänger-T
- Bettsensormatte oder Stuhlsensormatte als Zubehör erforderlich
- Anschluss der Sensormatte an RJ11-Buchse des Universalsensors
- Ereignismeldung „Bett belegt“, wenn die Benutzerin oder der Benutzer in das Bett gegangen ist. Keine Notrufauslösung.
- Ereignismeldung „Bett nicht belegt“, wenn die Benutzerin oder der Benutzer das Bett verlassen hat. Keine Notrufauslösung.

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT):	80 x 50 x 25 mm
Gewicht (inkl. Batterie):	75 g
Anschlussleitung:	ca. 200 cm
Abmessungen Magnet (HxBxT):	51 x 15 x 12 mm
Abmessungen Magnetschalter (HxBxT):	51 x 15 x 12 mm
Batterietyp:	Lithium-Batterie, 3,6 V, AA, ER14505
Funkfrequenz:	869,2125 MHz



Installationsanleitung

Universalsensor
(Artikel-Nr. 62505/030)

<https://www.tunstall.de/siteassets/de-technical-documentation/00880507.pdf>

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
62505/030	Universalsensor	
Zubehör, bei Bedarf bestellen:		
D4106009A	Bettsensormatte	für Einzelbett, für Doppelbett sind 2 erforderlich
D4106010A	Stuhlsensormatte	

Funk-Sensormatte 869 MHz

Z00800201



Allgemeine Beschreibung

Großflächige Matte zur Rufauslösung durch Betreten oder Drücken der Matte.

Geeignet zum Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Seniorenheimen, Betreutem Wohnen oder ähnlichen Einrichtungen sowie im privaten Umfeld.

Die Matte wird z.B. vor dem Bett platziert. Wenn die Patientin oder der Patient das Bett verlässt oder aus dem Bett auf die Matte fällt, wird ein Ruf ausgelöst. Der Ruf wird an die angeschlossene Rufanlage bzw. das angeschlossene Rufgerät weitergeleitet.

Ausstattung und Funktionen

- Verwendung in Verbindung mit den folgenden Produkten von Tunstall:
 - Alle aktuellen Hausnotrufgeräte
 - Alle Funkempfänger-T und -T UP
 - Mobiler Funkempfänger-T

- Große Sensorfläche
- Spritzwassergeschützt
- Weich-PVC, leicht zu reinigen
- Funkprotokoll Tunstall Classic Radio
- Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur:
 - In Verbindung mit Hausnotrufgerät bis zu 50 m
 - In Verbindung mit Funkempfänger-T und -T UP bis zu 30 m
 - In Verbindung mit Mobilem Funkempfänger-T bis zu 30 m
- Batteriebetrieb - keine Verdrahtung, CR2032, wechselbar
- Wenn die Batterie schwach ist:
 - Das Hausnotrufgerät löst automatisch einen Hintergrundruf zur Servicezentrale aus.
 - Die LED am Funkempfänger-T und -T UP blinkt rot.
 - Das Display des Mobilen Funkempfängers-T zeigt „Batterie leer“ an.

Technische Daten

Abmessungen (BxT):	1200 x 500 mm
Gewicht:	ca. 1500 g
Dicke der Trittfläche:	4 mm
Material:	Weich-PVC
Farbe:	Elfenbeinfarben
Batterie:	CR2032, Knopfzelle, chemisches System: Primär Lithium Mangan, 3 V
Funkfrequenz:	869,2125 MHz

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
Z00800201	Funk-Sensormatte 869 MHz	

Funk-Trittsensormatte CM

Z00800301



Allgemeine Beschreibung

Besonders robuste Kontakt-Trittsensormatte zur Überwachung von Personenbewegungen, auch für Demenz- oder Vitaldetektion. Stabile tritt-, rutsch- und stolperfeste Ausführung mit abgeschrägten Kanten und leicht zu reinigender Oberfläche in Noppenstruktur.

Die Matte wird z.B. vor dem Bett platziert. Wenn die Patientin oder der Patient das Bett verlässt oder aus dem Bett auf die Matte fällt, wird ein Ruf ausgelöst. Der Ruf wird an die angeschlossene Rufanlage bzw. das angeschlossene Rufgerät weitergeleitet.

Ausstattung und Funktionen

- Verwendung in Verbindung mit den folgenden Produkten von Tunstall:
 - Alle aktuellen Hausnotrufgeräte
 - Alle Funkempfänger-T und -T UP
 - Mobiler Funkempfänger-T
- Eckige Form
- Funkprotokoll Tunstall Classic Radio
- Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur:
 - In Verbindung mit Hausnotrufgerät bis zu 50 m
 - In Verbindung mit Funkempfänger-T und -T UP bis zu 30 m
 - In Verbindung mit Mobilem Funkempfänger-T bis zu 30 m

- Große Sensorfläche
- Spritzwassergeschützt
- Feucht reinigungsfähig und desinfizierbar
- Batteriebetrieb - keine Verdrahtung, CR2032, wechselbar
- Wenn die Batterie schwach ist:
 - Das Hausnotrufgerät löst automatisch einen Hintergrundruf zur Servicezentrale aus.
 - Die LED am Funkempfänger-T und -T UP blinkt rot.
 - Das Display des Mobilen Funkempfängers-T zeigt „Batterie leer“ an.

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT):	9* x 1100 x 700 mm
* Höhe am Sendemodul:	15 mm
Gewicht:	ca. 7500 g
Material:	Polyurethan (PU)
Schutzart:	IP54
Farbe:	Grau
Batterie:	CR2032, Knopfzelle, chemisches System: Primär Lithium Mangan, 3 V
Funkfrequenz:	869,2125 MHz

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
Z00800301	Funk-Trittsensormatte CM	

Funk-Trittsensormatte NM

Z00800302



Allgemeine Beschreibung

Besonders robuste Kontakt-Trittsensormatte zur Überwachung von Personenbewegungen, auch für Demenz- oder Vitaldetektion. Stabile tritt-, rutsch- und stolperfeste Ausführung mit abgeschrägten Kanten und leicht zu reinigender Oberfläche in Noppenstruktur.

Die Matte wird z.B. vor dem Bett platziert. Wenn die Patientin oder der Patient das Bett verlässt oder aus dem Bett auf die Matte fällt, wird ein Ruf ausgelöst. Der Ruf wird an die angeschlossene Rufanlage bzw. das angeschlossene Rufgerät weitergeleitet.

Ausstattung und Funktionen

- Verwendung in Verbindung mit den folgenden Produkten von Tunstall:
 - Alle aktuellen Hausnotrufgeräte
 - Alle Funkempfänger-T und -T UP
 - Mobiler Funkempfänger-T
- Halbrunde Form
- Funkprotokoll Tunstall Classic Radio

- Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur:
 - In Verbindung mit Hausnotrufgerät bis zu 50 m
 - In Verbindung mit Funkempfänger-T und -T UP bis zu 30 m
 - In Verbindung mit Mobilem Funkempfänger-T bis zu 30 m
- Große Sensorfläche
- Spritzwassergeschützt
- Feucht reinigungsfähig und desinfizierbar
- Batteriebetrieb - keine Verdrahtung, CR2032, wechselbar
- Wenn die Batterie schwach ist:
 - Das Hausnotrufgerät löst automatisch einen Hintergrundruf zur Servicezentrale aus.
 - Die LED am Funkempfänger-T und -T UP blinkt rot.
 - Das Display des Mobilen Funkempfängers-T zeigt „Batterie leer“ an.

Technische Daten

Abmessungen	
(HxBxT):	9* x 1100 x 700 mm
* Höhe am	
Sendemodul:	15 mm
Gewicht:	ca. 7500 g
Material:	Polyurethan (PU)
Schutzart:	IP54
Farbe:	Grau
Batterie:	CR2032, Knopfzelle, chemisches System: Primär Lithium Mangan, 3 V
Funkfrequenz:	869,2125 MHz

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
Z00800302	Funk-Trittsensormatte NM	

Blitzlicht-Empfänger

75071603



Allgemeine Beschreibung

Der Blitzlicht-Empfänger dient dazu, die Benutzerin oder den Benutzer bei bestimmten Ereignissen (z.B. Türklingel oder Telefonklingeln) in der Wohnung durch blitzendes Licht zu informieren. Hierzu empfängt er die Signale von einem Sendegerät.

Technische Daten

Höhe:	140 mm
Durchmesser:	70 mm
Farbe:	Weiß
Spannungsversorgung:	durch Netzadapter, 230 V ~
Gewicht:	300 g
Funkfrequenz:	869,3 MHz

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
75071603	Blitzlicht-Empfänger	

Telefonsender

75071602



RJ11-Eingang für analoges Telefonnetz.

Klettverschluss für Wandbefestigung im Lieferumfang.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	2 x 1,5 V AA Batterien
Funkfrequenz:	868,30 MHz
Funkreichweite:	abhängig von Gebäudestruktur bis zu 250 m (freies Feld)
Abmessungen (HxBxT):	100 x 65 x 27 mm
Gewicht (mit Batterien):	120 g
Umgebungstemperatur:	+15 °C bis +35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95% (nicht kondensierend)

Allgemeine Beschreibung

Der Telefonsender hilft der Benutzerin oder dem Benutzer, das Telefonklingeln des Festnetztelefons zu bemerken. Der Telefonsender signalisiert dieses dem separat zu bestellendem Blitzlicht-Empfänger (75071603), der die Benutzerin oder den Benutzer mit Lichtsignal informiert.

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
75071602	Telefonsender	
Empfangsgerät, separat bestellen:		
75071603	Blitzlicht-Empfänger	siehe separates Datenblatt

Türklingel-Signalsender

75071605



Externer Trigger-Eingang (3,5 mm)

Klettverschluss für Wandbefestigung im Lieferumfang.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	2 x 1,5 V AA Batterien
Funkfrequenz:	868,30 MHz
Funkreichweite:	Abhängig von Gebäudestruktur bis zu 50 m
Abmessungen (HxBxT):	100 x 65 x 27 mm
Gewicht (mit Batterien):	120 g
Umgebungstemperatur:	+15 °C bis +35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95% (nicht kondensierend)

Allgemeine Beschreibung

Der Türklingel-Signalsender hilft der Benutzerin oder dem Benutzer das Klingeln an der Haustür zu bemerken. Wenn die Türklingel oder Gegensprechanlage betätigt wird, signalisiert der Türklingel-Signalsender dieses dem separat zu bestellendem Blitzlicht-Empfänger (75071603), der die Benutzerin oder den Benutzer mit Lichtsignal informiert.

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
75071605	Türklingel-Signalsender	
Erforderliches Zubehör:		
75071603	Blitzlicht-Empfänger	siehe separates Datenblatt

ambiact T1

75071402



Allgemeine Beschreibung

Der Elektrogeräte-Gebrauchssensor ambiact T1 dient zur automatischen Registrierung von Aktivität der Hausnotruf-Teilnehmerin oder des Hausnotruf-Teilnehmers und vereinfacht somit die Durchführung der Aktivitätskontrolle. Der ambiact T1 sendet eine drahtlose Meldung zum Hausnotrufgerät, wenn ein Elektrogerät ein- oder ausgeschaltet wurde.

Der ambiact T1 wird einfach in die Steckdose und das zu überwachende Elektrogerät in die Buchse des ambiact T1 gesteckt. Bei dem Elektrogerät muss es sich um ein Gerät handeln, das die Teilnehmerin oder der Teilnehmer im normalen Alltag nutzt (TV, Toaster etc.).

Durch die Nutzung des ambiact T1 wird die Akzeptanz der Aktivitätskontrolle bei den Hausnotruf-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern deutlich erhöht, weil kein regelmäßiger Tastendruck mehr erforderlich ist. Auch die Anzahl der Fehlalarme (vergessenes Drücken der Taste) sinkt merklich. Mit dem ambiact T1 ist die Nutzung der Aktivitätskontrolle auch für stark vergessliche und sogar demente Personen möglich.

HINWEIS! Das Hausnotrufgerät muss für die Verwendung des ambiact T1 gemäß mitgelieferter Gebrauchsanweisung konfiguriert werden.

Ausstattung und Funktionen

- In Verbindung mit allen aktuellen Hausnotrufgeräten von Tunstall
- Funkprotokoll Tunstall Classic
- Funkreichweite abhängig von den räumlichen Gegebenheiten bis zu 50 m
- Einfache Montage
- Absolut unaufdringlich (kein Kamera-Gefühl)
- Zuverlässige Aktivitätserkennung (Haustiere unproblematisch)
- Kompatibel mit nahezu allen Haushaltsgeräten (max. Leistung: 2300 W, mind. 3 W Änderung der Leistungsaufnahme bei Einschalten)

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT):	85 x 55 x 80 mm
Gewicht:	133 g
Spannungsversorgung::	230 V AC / 50 Hz
Stromverbrauch im Betrieb:	1,5 Watt
Umgebungstemperatur:	
• Betrieb:	0 °C bis +45°C
• Lagerung:	-10 °C bis +50°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	0% bis 80% (nicht kondensierend)

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
75071402	ambiact T1	

Funk-Blitzalarm-T

Z00820271



Allgemeine Beschreibung

Der Funk-Blitzalarm-T wird in eine 230-V-Steckdose eingesteckt. Er meldet Rufe von zugeordneten Funksendern optisch über eine Blitzleuchte und/oder akustisch über einen Signalgeber. Die Abstimmung des Signals erfolgt per Tastendruck am Funk-Blitzalarm-T.

Die Signalisierungsart ist einstellbar: Blitzleuchte und Signalgeber, nur Blitzleuchte, nur Signalgeber.

HINWEIS! Die Nutzung des Funk-Blitzalarms-T ist kein Ersatz für das Tunstall-Rufsystem, dem der Funksender zugeordnet ist. Es handelt sich hier lediglich um eine zusätzliche, nicht überwachte Signalisierung.

Ausstattung und Funktionen

- Zum Einstecken in eine 230-V-Steckdose

- Die Steckdose kann durch einen anderen Verbraucher weiterhin genutzt werden, die max. Schaltleistung von 10 A (2300 W) darf jedoch nicht überschritten werden.
- Antenne integriert
- 64 Funksender programmierbar
- Optische Signalisierung durch eingebaute Blitzleuchte
- Akustische Signalisierung durch eingebauten Signalgeber
- Wenn die Batterie eines zugeordneten Funksenders schwach ist, blinkt die LED an dem Funk-Blitzalarm-T orange
- Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur bis zu 30 m

Verwendbare Funksender

- MyAmie (Artikel-Nr. P68007/02)
- MyAmie (Artikel-Nr. P68007/04)
- Funk-Sensormatte 869 MHz (Artikel-Nr. Z00800201)
- Großflächen-Funk-Pneumatiktaster (Artikel-Nr. Z00820115)
- Funk-Trittsensormatte CM (Artikel-Nr. Z00800301)
- Funk-Trittsensormatte NM (Artikel-Nr. Z00800302)
- Weitere Funksender auf Anfrage

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT):	110 x 50 x 40 mm
Gewicht:	ca. 130 g
Signallautstärke:	85 dB
Schutzart:	IP30
Funkfrequenz:	869,2125 MHz
Spannungsversorgung:	230 V AC / 50 Hz

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
Z00820271	Funk-Blitzalarm-T	

Funk-Steckdose-T

Z00820270



Allgemeine Beschreibung

Die Funk-Steckdose-T ermöglicht in Verbindung mit zugeordneten Funksendern das Schalten von 230-V-Verbrauchern. Die Funk-Steckdose-T schaltet nach Empfang eines Rufsignals den angeschlossenen Verbraucher entweder für fünf Minuten oder bis zum nächsten Funksignal.

Eine typische Anwendung ist z.B. das Schalten einer Lampe durch eine Funk-Sensormatte. Eine Person löst beim Aufstehen auf die Funk-Sensormatte nicht nur einen Ruf aus, sondern schaltet gleichzeitig automatisch eine Lampe ein, die an der Funk-Steckdose-T angeschlossen ist.

Timer-Betrieb: Funk-Steckdose-T schaltet für 5 Minuten ab Auslösen des Funksenders. Ein erneutes Auslösen des Funksenders während dieser 5 Minuten setzt den Timer wieder auf 5 Minuten zurück.

Toggle-Betrieb: Funk-Steckdose-T schaltet durch Auslösen des Funksenders oder Drücken einer Taste an der Funk-Steckdose-T und bleibt in diesem Zustand bis zur nächsten Auslösung.

Unterschiedliche Funksender können dem Timer-Betrieb und Toggle-Betrieb zugeordnet werden.

Beide Betriebsarten können gleichzeitig verwendet werden.

HINWEIS! Funk-Steckdose-T dient nicht zur Weiterleitung von Rufen, sondern zum Schalten eines 230-V-Verbrauchers unabhängig von der Rufweiterleitung.

Ausstattung und Funktionen

- Zum Einstecken in eine 230-V-Steckdose
- Max. Schaltleistung: 10 A (2300 W)
- Antenne integriert
- 64 Funksender programmierbar
- Schaltrelais: Einpolig, Schaltstrom 10 A resistiv
- Wenn die Batterie eines zugeordneten Funksenders schwach ist, blinkt die LED an der Funk-Steckdose-T orange
- Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur bis zu 30 m

Verwendbare Funksender

- MyAmie (Artikel-Nr. P68007/02)
- MyAmie (Artikel-Nr. P68007/04)
- Funk-Sensormatte 869 MHz (Artikel-Nr. Z00800201)
- Großflächen-Funk-Pneumatiktaster (Artikel-Nr. Z00820115)
- Funk-Trittsensormatte CM (Artikel-Nr. Z00800301)
- Funk-Trittsensormatte NM (Artikel-Nr. Z00800302)
- Weitere Funksender auf Anfrage

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT):	110 x 50 x 40 mm
Gewicht:	ca. 130 g
Schutzart:	IP30
Funkfrequenz:	869,2125 MHz
Spannungsversorgung:	230 V AC / 50 Hz

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
Z00820270	Funk-Steckdose-T	

5. Verdrahtetes Zubehör

Inhalt

Zugtaster	55
75040004	55
Ruftaster	56
75040008	56
Birntaster mit 2 Ruftasten, 3 m	57
75040006	57
Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen	58
75040005	58
Sensormatte mit freien Kabelenden	59
Z00800200	59

Zugtaster

75040004



Anschluss an Lifeline-Hausnotrufgeräte mit Kontakt-eingang.

Ausstattung und Funktionen

- 2,5 m rote Zugschnur mit rotem Triangelgriff
- Sicherheitsverschluss öffnet bei zu starker Zugkraft
- Eindeutige Kennzeichnung durch Symbol
- Schließer-Kontakt
- Dichtungsflansch, Schutzart IP44
- Passend für einteilige Einbaudose
- Zentralplatte 55 x 55 mm im Lieferumfang
- Rahmen Jung AS 500 im Lieferumfang

Technische Daten

Gewicht: ca. 90 g
Farbe: Alpinweiß

Allgemeine Beschreibung

Zugtaster zum Auslösen von Rufen. Geeignet zur Deckenmontage oder Wandmontage.

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
75040004	Zugtaster	
Erforderliches Zubehör:		
17010000	Einbaudose Mauerwerk, 1-teilig	siehe Anhang „Zubehör“
17510000	Einbaudose Hohlwand, 1-teilig	siehe Anhang „Zubehör“
Optionales Zubehör:		
19920016	Aufputz-Kappe, 1-fach, alpinweiß	siehe Anhang „Zubehör“

Ruftaster

75040008



Allgemeine Beschreibung

Taster zum Auslösen von Rufen.

Anschluss an Lifeline-Hausnotrufgeräte mit Kontakt-
eingang.

Vorzugsweise hergestellt für den Wandeinbau.

Ausstattung und Funktionen

- Eindeutige Kennzeichnung durch Symbol
- Schließer-Kontakt
- Passend für einteilige Einbaudose
- Zentralplatte 55 x 55 mm im Lieferumfang
- Rahmen Jung AS 500 im Lieferumfang

Technische Daten

Farbe: Alpinweiß

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
75040008	Ruftaster	
Erforderliches Zubehör:		
17010000	Einbaudose Mauerwerk, 1-teilig	siehe Anhang „Zubehör“
17510000	Einbaudose Hohlwand, 1-teilig	siehe Anhang „Zubehör“
Optionales Zubehör:		
19920016	Aufputz-Kappe, 1-fach, alpinweiß	siehe Anhang „Zubehör“

Birntaster mit 2 Ruftasten, 3 m

75040006



Ausstattung und Funktionen

- Ergonomisch angeordnete Tasten zur einfachen Bedienung und Verhinderung von Fehlauslösungen
- Leichte Reinigung und Desinfektion durch feuchtigkeitsgeschütztes, rundherum geschlossenes Gehäuse
- 2 rote Ruftasten
- 3 m lange, flexible Anschlussleitung mit Mini-DIN-Stecker

Technische Daten

Abmessungen (HxB): 60 x 20 mm
Gehäusefarbe: RAL 9018 papyrusweiß


Allgemeine Beschreibung

Feuchtigkeitsgeschützter Birntaster mit zwei Ruftasten zur einfachen Rufauslösung.

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
75040006	Birntaster mit 2 Ruftasten, 3 m	
Erforderliches Zubehör:		
75040005	Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen	siehe eigenes Datenblatt

Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen

75040005

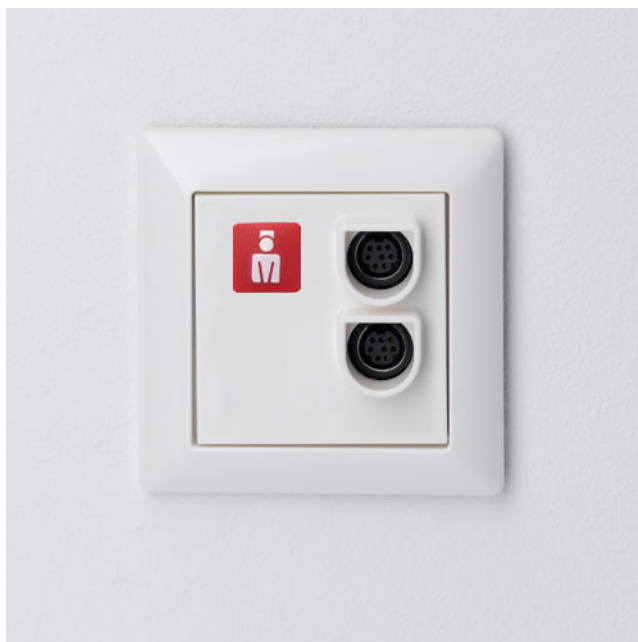

Anschluss an Lifeline-Hausnotrufgeräte mit Kontakt-
eingang.

Vorzugsweise hergestellt für den Wandeinbau.

Ausstattung und Funktionen

- Rote Ruftaste
- Eindeutige Kennzeichnung durch Symbol
- 2 Steckbuchsen zum Anschluss von externen Rufgeräten
- Passend für einteilige Einbaudose
- Zentralplatte 55 x 55 mm im Lieferumfang
- Rahmen Jung AS 500 im Lieferumfang
- Schraubanschlüsse

Technische Daten

Abmessungen (HxB): 80,8 x 80,8 mm

Farbe: Alpinweiß

Allgemeine Beschreibung

Ruftaste zum Auslösen von Rufen. 2 Steckbuchsen zum Anschluss von externen Rufgeräten, z.B. Birntaster oder Sensormatte.

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
75040005	Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen	
Erforderliches Zubehör:		
17010000	Einbaudose Mauerwerk, 1-teilig	siehe Anhang „Zubehör“
17510000	Einbaudose Hohlwand, 1-teilig	siehe Anhang „Zubehör“
Optionales Zubehör:		
19920016	Aufputz-Kappe, 1-fach, alpinweiß	siehe Anhang „Zubehör“

Sensormatte mit freien Kabelenden

Z00800200



Ausstattung und Funktionen

- Große Sensorfläche
- Spritzwassergeschützt
- Weich-PVC, leicht zu reinigen
- Anschlussleitung mit offenen Drahtenden zum Anschluss an beliebiges Alarmierungssystem (z.B. Hausnotrufgerät Lifeline mit Kontakteingang)
- Schließer-Kontakt

Technische Daten

Abmessungen (BxT):	1200 x 500 mm
Gewicht:	ca. 1500 g
Dicke der Trittfläche:	4 mm
Material:	Weich-PVC
Farbe:	Elfenbeinfarben
Spannungsversorgung:	24 V DC

Allgemeine Beschreibung

Großflächige Matte zur Rufauslösung durch Betreten oder Drücken der Matte.

Geeignet zum Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Seniorenheimen, Betreutem Wohnen oder ähnlichen Einrichtungen sowie im privaten Umfeld.

Die Matte wird z.B. vor dem Bett platziert. Wenn die Patientin oder der Patient das Bett verlässt oder aus dem Bett auf die Matte fällt, wird ein Ruf ausgelöst. Der Ruf wird an die angeschlossene Rufanlage bzw. das angeschlossene Rufgerät weitergeleitet.

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
Z00800200	Sensormatte mit freien Kabelenden	

6. Mobile Notrufgeräte

Inhalt

MobileCare.pro (weiß)	61
75121000	61
MobileCare.pro (schwarz)	63
75121020	63

MobileCare.pro (weiß)

Mobiles Notrufgerät mit Ortung & Fallsensor

75121000



Allgemeine Beschreibung

Mobile 4G-Ortungseinheit mit Ruftaste, Fallsensor und Zwei-Wege-Kommunikation. Dank GPS und Bewegungssensor wird die Servicezentrale alarmiert, wenn die Benutzerin oder der Benutzer gefallen ist, sich längere Zeit nicht bewegt oder eine definierte Zone betritt oder verlässt, sodass eine schnelle Reaktion in Notfällen ermöglicht wird. Dank der intelligenten Dockingstation mit Bluetoothfunktion und Ladefunktion funktioniert MobileCare.pro auch in Innenräumen.

Ausstattung und Funktionen

- Notruf durch Drücken der Ruftaste
- GPS-Ortung mit AGPS für schnelle und genaue Positionsfindung
- Automatischer Ruf bei Betreten oder Verlassen einer definierten Zone (Geofencing) konfigurierbar
- Freisprecheinrichtung für direkte Kommunikation
- SMS-Nachricht mit Positionsanzeige
- Ca. 2 bis 3 Stunden Ladezeit bis zur vollständigen Ladung des Akkus
- Automatische Akku-schwach-Meldung am Gerät und Meldung an Servicezentrale / Kontaktperson

- Einfaches Aufladen in mitgelieferter Dockingstation (mit Steckernetzteil und USB-Kabel)
- SIM-Karte fest eingebaut. Abschluss eines entsprechenden Mobilfunkvertrages mit Tunstall erforderlich.
- Regendicht, gegen Spritzwasser geschützt (IPX7)
- Einfache Konfiguration des Gerätes per SMS-Befehle
- Remote-Systemupdates
- Gehäusefarbe: Weiß

Lieferumfang

- MobileCare.pro
- Dockingstation
- Mikro-USB-Kabel
- Halsband mit Schlüsselbundhalterung
- Steckernetzteil (EU)
- Gebrauchsanweisung
- SIM-Karte fest eingebaut

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT):	62 x 47 x 17 mm
Gewicht inkl. Akku:	53 g
GNSS-Kompatibilität:	GPS / GLONASS / Beidou
Zell-Ortung:	Nur AGPS
Indoor-Ortung:	BLE, WiFi, LBS
SMS-Kommunikation:	Über 2G
Internet-Kommunikation:	4G-LTE und Backup
Voice-Kommunikation:	Über 2G (bidirektional)
Akkutyp:	Lithium-Polymer-Akku; 3,7 V; 950 mAh
Akkulaufzeit:	Ca. 48 Stunden
Lademöglichkeiten:	Dockingstation / USB-3-Ladeadapter / kontaktlos über Qi-Ladegerät
WiFi:	WiFi (2,4 GHz) a/b/g/n

Bluetooth:	V2.1+EDR, 3.0+HS, V4.1+HS compliant	Umgebungstemperatur:	
	Wechselbar durch Öffnen des Gehäuses	• Betrieb:	-20 °C bis +60 °C
SIM-Karte (Nano-SIM):	Windows-Programm über USB, SMS- Befehle von Ferne, auch Programmierung über PNC 365 möglich	• Lagerung:	-30 °C bis +70 °C
Programmierung:		Relative Luftfeuchte:	5% - 95%, nicht kondensierend

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
75121000	MobileCare.pro (weiß)	
Zubehör & Ersatzteile, bei Bedarf bestellen:		
75121001	Dockingstation MobileCare.pro, weiß	
75121002	Reiseladeschale MobileCare.pro, weiß	
75121003	Mikro-USB-Kabel MobileCare.pro, weiß	
75121004	Steckernetzteil MobileCare.pro, weiß	
75121005	Halsband MobileCare.pro, orange	
75121009	Prog.tool Organisation auf USB-Stick	

MobileCare.pro (schwarz)

Mobiles Notrufgerät mit Ortung & Fallsensor

75121020



Allgemeine Beschreibung

Mobile 4G-Ortungseinheit mit Ruftaste, Fallsensor und Zwei-Wege-Kommunikation. Dank GPS und Bewegungssensor wird die Servicezentrale alarmiert, wenn die Benutzerin oder der Benutzer gefallen ist, sich längere Zeit nicht bewegt oder eine definierte Zone betritt oder verlässt, sodass eine schnelle Reaktion in Notfällen ermöglicht wird. Dank der intelligenten Dockingstation mit Bluetoothfunktion und Ladefunktion funktioniert MobileCare.pro auch in Innenräumen.

Ausstattung und Funktionen

- Notruf durch Drücken der Ruftaste
- GPS-Ortung mit AGPS für schnelle und genaue Positionsfindung
- Automatischer Ruf bei Betreten oder Verlassen einer definierten Zone (Geofencing) konfigurierbar
- Freisprecheinrichtung für direkte Kommunikation
- SMS-Nachricht mit Positionsanzeige
- Ca. 2 bis 3 Stunden Ladezeit bis zur vollständigen Ladung des Akkus
- Automatische Akku-schwach-Meldung am Gerät und Meldung an Servicezentrale / Kontaktperson
- Einfaches Aufladen in mitgelieferter Dockingstation (mit Steckernetzteil und USB-Kabel)

- SIM-Karte fest eingebaut. Abschluss eines entsprechenden Mobilfunkvertrages mit Tunstall erforderlich.
- Regendicht, gegen Spritzwasser geschützt (IPX7)
- Einfache Konfiguration des Gerätes per SMS-Befehle
- Remote-Systemupdates
- Gehäusefarbe: Schwarz

Lieferumfang

- MobileCare.pro
- Dockingstation
- Mikro-USB-Kabel
- Halsband mit Schlüsselbundhalterung
- Steckernetzteil (EU)
- Gebrauchsanweisung
- SIM-Karte fest eingebaut

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT):	62 x 47 x 17 mm
Gewicht inkl. Akku:	53 g
GNSS-Kompatibilität:	GPS / GLONASS / Beidou
Zell-Ortung:	Nur AGPS
Indoor-Ortung:	BLE, WiFi, LBS
SMS-Kommunikation:	Über 2G
Internet-Kommunikation:	4G-LTE und Backup
Voice-Kommunikation:	Über 2G (bidirektional)
Akkutyp:	Lithium-Polymer-Akku; 3,7 V; 950 mAh
Akkulaufzeit:	Ca. 48 Stunden
Lademöglichkeiten:	Dockingstation / USB-3-Ladeadapter / kontaktlos über Qi-Ladegerät
WiFi:	WiFi (2,4 GHz) a/b/g/n
Bluetooth:	V2.1+EDR, 3.0+HS, V4.1+HS compliant

SIM-Karte (Nano-SIM):	Wechselbar durch Öffnen des Gehäuses	Umgebungstemperatur:	
Programmierung:	Windows-Programm über USB, SMS-Befehle von Ferne, auch Programmierung über PNC 365 möglich	• Betrieb:	-20 °C bis +60 °C
		• Lagerung:	-30 °C bis +70 °C
		Relative Luftfeuchte:	5% - 95%, nicht kondensierend


Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
75121020	MobileCare.pro (schwarz)	
Zubehör & Ersatzteile, bei Bedarf bestellen:		
75121021	Dockingstation MobileCare.pro, schwarz	
75121022	Reiseladeschale MobileCare.pro, schwarz	
75121023	Mikro-USB-Kabel MobileCare.pro, schwarz	
75121024	Steckernetzteil MobileCare.pro, schwarz	
75121005	Halsband MobileCare.pro, orange	
75121009	Prog.tool Organisation auf USB-Stick	

7. Servicezentrale PNC

Inhalt

PNC8 Grundmodul	66
PNC 365 Hosting	67

PNC8 Grundmodul

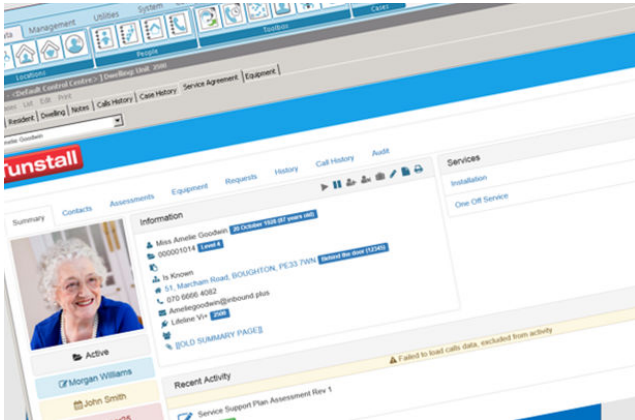

Allgemeine Beschreibung

Die PNC ist eine stabile und leistungsfähige Software zur Bearbeitung von Notrufen. Sie dient zur Stammdatenpflege der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und deren Kontaktpersonen, für die schnelle Annahme von Meldungen und Notrufen, für die konsequente Dokumentation aller Änderungen und Meldungen der Notrufsysteme für die Kommunikation per Telefon, SMS oder E-Mail und für die Darstellung von Besonderheiten von Wohnorten, Teilnehmerinnen und Teilnehmern oder Kontaktpersonen.

PNC Core

- Rufbearbeitung

Arbeitsplätze

- 3 Rufbearbeitungsplätze inklusive (max. 1-10)
- 3 Datenbearbeitungsplätze inklusive (max.: 1-10)

Weitere Features

- Mobile Notruf-Systeme optional zubuchbar
- Multiprotokolle optional zubuchbar (max. 100)
- Rabatte bei Abschluss eines exklusiven Abnahmevertrags für Telecare-Geräte der Firma Tunstall


Service

- Updates optional zubuchbar
- Support 8/5 (für Support außerhalb entstehen Extrakosten)
- Support 24/7 optional zubuchbar

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
kundenspezifisch	PNC8 Grundmodul	

PNC 365 Hosting

(inkl. aller Erweiterungsmodule)

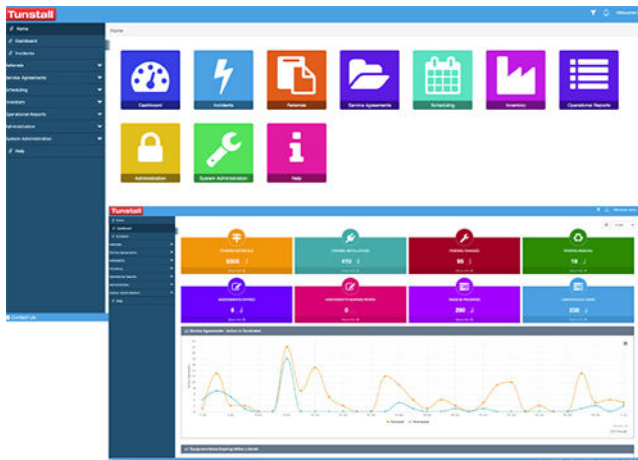

Allgemeine Beschreibung

Das Tunstall PNC Hosting spart eigene Hard- und Softwarekosten sowie Betriebskosten: Der eigene Hausnotrufbetrieb wird über externe, redundant ausgelegte Hardware und Software abgewickelt. Der Zentralenbetreiber trägt hier zudem auch nur ein auf ein Minimum reduziertes Ausfallrisiko durch mehrere Redundanzebenen.

PNC Core

- Rufbearbeitung

Arbeitsplätze

- 3 Rufbearbeitungsplätze inklusive (max. 500)

- 3 Datenbearbeitungsplätze inklusive (max.: 500)

Weitere Features

- Mobile Notruf-Systeme optional zubuchbar
- Dashboard (Anzeigen) inklusive
- Multiprotokolle optional zubuchbar
- Alle Lizenzen für Betriebssysteme, Datenbank, Zugriff inklusive

Redundanzen

- Telefonanbindung mehrfach
- Internetanbindung mehrfach
- Stromversorgung mehrfach
- Standort-/Geo-Redundanz
- Datenbank redundant

Service

- Updates
- Sicherheitsupdates für die IT-Infrastruktur
- Alle Upgrades der PNC365 inklusive
- Support 24/7

Erfüllte Standards

- ISO27001 und 27002
- IT-Grundschutz
- DS-GVO
- DIN EN 50134

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
kundenspezifisch	PNC 365 Hosting	

8. Zubehör

Inhalt

Ersatzakku	68
Steckernetzteile	69
Externe Mobilfunkantennen	71
Wandhalterungen und Tischfüße	72
Geräteaufkleber	74
Zubehör zu Mobiler Funkempfänger-T	75
Zubehör zu MyAmie	76
Programmiertools	78
Bett- und Stuhlsensormatten	78
Leitungen und Stecker	79
Einbaudosen, Aufputz-Kappen	81

Ersatzakku

Ersatzakku: Li-Ionen-Akku; 7.2V / 2500mAh / 18Wh

022-25-012

Ersatzakku für folgende Geräte:

- Lifeline Digital (Artikel-Nr. 022-25-904)



Ersatzakku: Ni-MH-Akkublock; 7,2 V; 2000 mAh

D5306001

Ersatzakku für folgende Geräte:

- Lifeline Smart Hub: 4G-Gerät



Ersatzakku: Ni-MH-Akkublock; 7,2 V; 1200 mAh

D3706005

Ersatzakku für folgende Geräte:

- Lifeline Smart Hub: 3G-Gerät
- Lifeline Vi und Lifeline Vi+, wenn auf dem Typenschild des Gerätes steht: „Steckernetzgerät XD5706004A“.
- Lifeline GSM



Ersatzakku: Li-Ionen-Akku; 3,7 V; 2600 mAh

D3706010A

Ersatzakku für folgende Geräte:

- Lifeline Vi und Lifeline Vi+, wenn auf dem Typenschild des Gerätes steht: „Steckernetzgerät XD5706070A“.



Steckernetzteile

Steckernetzteil 12 V (weiß), Typ: SP-221585, für Lifeline Digital

022-25-013

Steckernetzteil für folgende Geräte:

- Lifeline Digital (Artikel-Nr. 022-25-904)
- Eingang: 120 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,5 A
- Ausgang: +12 V DC, 1000 mA
- Modell: DSA-12PFT-12 FEU 120100
- Typ-Nummer: SP-251585

HINWEIS! Die Typ-Nummer **SP-251585** steht unten rechts auf dem Typenschild des Steckernetzteils.



Steckernetzteil 12 V, Typ: SP-248993

XD5706004A

Steckernetzteil für folgende Geräte:

- Lifeline Smart Hub
- Lifeline GSM
- Lifeline Vi und Lifeline Vi+, wenn auf dem Typenschild des Gerätes steht: „Steckernetzgerät XD5706004A“.
HINWEIS! Welches Steckernetzteil für ein Lifeline Vi oder Vi+ benötigt wird, entnehmen Sie dem Typenschild des Lifeline Vi.
- Eingang: 120 – 240 V AC, 50 / 60 Hz, 0,5 A
- Ausgang: +12 V DC, 1 A
- Modell: DSA-12PFT-12 FEU 120100
- Typ-Nummer: SP-248993

HINWEIS! Die Typ-Nummer **SP-248993** steht unten rechts auf dem Typenschild des Steckernetzteils.



Steckernetzteil 5 V, Typ: SP-249244

XD5706070A

Steckernetzteil für folgende Geräte:

- Lifeline Vi und Lifeline Vi+, wenn auf dem Typenschild des Gerätes steht: „Steckernetzgerät XD5706070A“.
HINWEIS! Welches Steckernetzteil für ein Lifeline Vi oder Vi+ benötigt wird, entnehmen Sie dem Typenschild des Lifeline Vi.
- Eingang: 100–240V AC, 50/60Hz, 0,2A
- Ausgang: +5 V DC, 1 A
- Modell: DSA-6PFG-05 FEU 050100
- Typ-Nummer: SP-249244

HINWEIS! Die Typ-Nummer **SP-249244** steht unten rechts auf dem Typenschild des Steckernetzteils.



USV 600 VA / 360 W, iPlug 600

21900000

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) zur Ausfallsicherung in Heim und Büro. Die kompakte Bauweise und die Vielseitigkeit des Einsatzes (eine Anzeige mit LEDs und vom Anwender auswechselbarer Akku) machen die USV zu einem Gerät, das sich wie ein Haushaltsgerät für jeden zum Schutz vor Überspannung und Stromausfall anwenden lässt. Bei Stromausfall werden die angeschlossenen Geräte für eine gewisse Zeit weiter mit Strom versorgt.



- 5 vor Stromausfällen geschützte Steckdosen
- 3 überspannungsgeschützte Steckdosen zur Versorgung von Verbrauchern mit hohem Einschaltstrom (Laserdrucker,...)
- Nennleistung: 600 VA / 360 W
- Vom Anwender austauschbarer Akku
- Installation auf Tisch oder Fußboden
- Schutz vor Kurzschluss
- Automatisches Wiedereinschalten
- Sicherheitskennzeichnung GS
- Schukostecker
- Abmessungen (HxBxT): 99 x 185 x 313 mm
- Gewicht: 3,7 kg
- Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: <95% nicht kondensierend
- VRLA AGM Bleiakku, wartungsfrei
- Wiederaufladezeit des Akkus: 6 bis 8 Stunden


Externe Mobilfunkantennen

Mobilfunkantenne für Lifeline Digital

022-25-015-01

Externe Mobilfunkantenne (weiß) für eine flexible Gerätepositionierung und gesicherten Netzempfang.

Geeignet für Lifeline Digital, Artikel-Nr. 022-25-904.

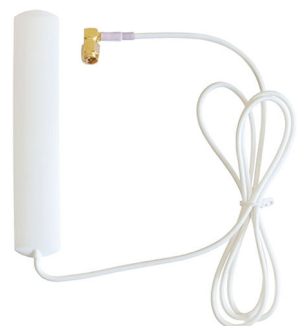

Mobilfunkantenne für Lifeline Smart Hub

S2205017

Externe Mobilfunkantenne für eine flexible Gerätepositionierung und gesicherten Netzempfang.

- Ca. 1 m Koaxialleitung
- Selbstklebend
- Abmessungen (HxBxT): 115 x 22 x 6 mm



Mobilfunkantenne für Lifeline GSM

S2005019

- Sockel magnetisch
- Ca. 2,5 m Leitung
- Abmessungen (HxBxT): 88 x 26 x 26 mm



Wandhalterungen und Tischfüße

Wandhalterung für Lifeline Smart Hub

D5702902C

- Verbessertes Kabelmanagement bei Wandmontage
- Zugentlastung



Lifeline nicht im
Lieferumfang

Tischfuß inkl. Wandhalterung für Lifeline Smart Hub

D5702904

- Tischaufstellung mit Neigung
- Zugentlastung



Lifeline nicht im
Lieferumfang

Wandhalterung für Lifeline Vi und Vi+

D5702905A

- Verbessertes Kabelmanagement bei Wandmontage
- Zugentlastung



Lifeline nicht im
Lieferumfang

Tischfuß inkl. Wandhalterung für Lifeline Vi und Lifeline Vi+

D5702907

- Tischaufstellung mit Neigung
- Zugentlastung



Lifeline nicht im
Lieferumfang

Rückseitendeckel für Lifeline Digital

022-25-229-01

Geeignet als Ersatzteil für Lifeline Digital, Artikel-Nr. 022-25-904.



Bewegungsmelder-Standhalter

346300483

Standhalter zur flexiblen Platzierung des Bewegungsmelders.

Mit dem Standhalter lässt sich der Bewegungsmelder ganz einfach dort positionieren, wo er gebraucht wird – zum Beispiel auf dem Boden oder auf Möbeln.


Passend für Bewegungsmelder (Artikel-Nr. 62505/035 und 61005/35).

HINWEIS: Bei dieser Installation ist der Bewegungsmelder nicht zur Sturzerkennung geeignet.

Material: Kunststoff

Gewicht: 19 g

Abmessungen (HxBxT): 25 x 57 x 41 mm

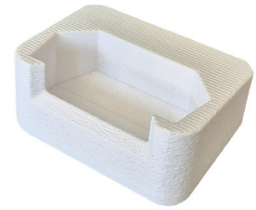

Geräteaufkleber

SIM-Karten-Slot Siegel Aufkleber

00018511

für Lifeline GSM.

- Verpackungseinheit: 10



Lifeline Vi Geräteaufkleber

00018512

als Bedienungshilfe zum Aufkleben auf ein Lifeline Vi oder Lifeline Vi+.

ACHTUNG! Nicht für Lifeline Vi Taris geeignet, da der Aufkleber dessen Tastaturbelegung nicht entspricht.



Zubehör zu Mobiler Funkempfänger-T

Desktop-Ladeschale inkl. Ladekabel für Mobiler Funkempfänger-T

Z00820510

Ladeschale für die Tischaufstellung zum Aufladen und Halten des Mobilen Funkempfängers-T (Artikel-Nr. Z00820500).

Optische Anzeige zeigt den Ladezustand des Akkus im Mobilen Funkempfänger-T an.

Ladekabel USB-A auf USB-C im Lieferumfang enthalten.

USB-Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



Technische Daten

Anzeige:	LED für Ladezustand
Anschluss:	USB-C
Spannungsversorgung:	5 V DC
Umgebungstemperatur:	0 bis +5 °C
Schutzart:	IP52
Gehäusefarbe:	grau
Gewicht:	ca. 50 g
Abmessungen (ØxT):	84 x 37 mm

Ladeschale Wandmontage inkl. Ladekabel für Mobiler Funkempfänger-T

Z00820520

Ladeschale für die Wandmontage zum Aufladen und Halten des Mobilen Funkempfängers-T (Artikel-Nr. Z00820500).

Optische Anzeige zeigt den Ladezustand des Akkus im Mobilen Funkempfänger-T an.

Ladekabel USB-A auf USB-C im Lieferumfang enthalten.

USB-Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



Technische Daten

Anzeige:	LED für Ladezustand
Anschluss:	USB-C
Spannungsversorgung:	5 V DC
Umgebungstemperatur:	0 bis +5 °C
Schutzart:	IP52
Gehäusefarbe:	grau
Gewicht:	ca. 50 g
Abmessungen (ØxT):	79 x 25 mm

USB-Ladegerät für Ladeschalen für Mobiler Funkempfänger-T**Z00820530**

USB-Ladegerät z.B. für Desktop-Ladeschale (Artikel-Nr. Z00820510) oder Ladeschale Wandmontage (Artikel-Nr. Z00820520) für den Mobilen Funkempfänger-T (Artikel-Nr. Z00820500).

Technische Daten

Eingangsspannung:	100 - 240 V AC
Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Ausgang:	5 V/1 A (5 W max.)
Ausgangsleistung:	5 W
USB-Port:	1x USB-A
Gehäusefarbe:	weiß
Gewicht:	35 g
Abmessungen (HxBxT):	13 x 35 x 70 mm



Zubehör zu MyAmie

Halskordel MyAmie, weiß, Verpackungseinheit 10 Stück**D6702178**

Ersatzteil für Funksender MyAmie P6800x/0x.

**Stretcharmband (20 mm) MyAmie, Verpackungseinheit 10 Stück****D6702145**


Ersatzteil für Funksender MyAmie P6800x/0x.

- Material: 13% elastisches Polyamid-ummanteltes Garn, 87% Polyester
- Abmessungen (LxB): ca. 210 x 20 mm

**Stretcharmband (10 mm) MyAmie, Verpackungseinheit 10 Stück****D6702135**

für Funksender, Artikel-Nr. P6800x/0x.

- Material: 13% elastisches Polyamid-ummanteltes Garn, 87% Polyester
- Abmessungen (LxB): ca. 180 x 10 mm

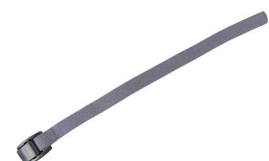

Gürtelklipp MyAmie, Verpackungseinheit 10 Stück**D6702136**

für Funksender, Artikel-Nr. P6800x/0x. Wahlweise auch zur Montage des Funksenders an der Wand verwendbar, so dass ein fest installierter Ruftaster entsteht. Empfohlener Installationsort z.B. am Bett, im Bad oder an der Wohnungstür.



MyAmie nicht im
Lieferumfang

EasyPress Adapter MyAmie, Verpackungseinheit 1 Stück**D6702112**

für Funksender MyAmie P6800x/0x zum vereinfachten Drücken der Ruftaste.



MyAmie nicht im
Lieferumfang

Schlüsselring MyAmie, Verpackungseinheit 1 Stück**D6702128**

für Funksender, Artikel-Nr. P6800x/0x.



MyAmie nicht im
Lieferumfang

Programmiertools

USB-TAPIT

51900/01

Programmierschnittstelle zum Anschluss eines Hausnotrufgeräts (AUX-Buchse) Lifeline Vi, Lifeline GSM oder PiperFon Connect an einen PC mit PC Connect Software.

- Status-LEDs zur Anzeige des Status der Kommunikationsverbindung und zur Anzeige der Kommunikation mit dem Hausnotrufgerät.
- Stromversorgung über Hausnotrufgerät
- Gewicht: 46 g
- Leitungslänge: 70 cm
- Abmessungen (HxBxT): 16 x 34 x 69 mm



Keypad

51900/10

Keypad zur einfachen, schnellen und sicheren Programmierung von Hausnotrufgeräten Lifeline Vi und Lifeline Vi+.

- LCD-Display, Folientastatur
- Anschlussleitung zum Anschluss des Keypad an den AUX-Anschluss des Hausnotrufgerätes
- Abmessungen (HxBxT): 11 x 80 x 96 mm



Bett- und Stuhlsensormatten

Bettsensormatte

D4106009A

Sensormatte zur Erfassung, ob sich eine Person im Bett befindet. Nutzung in Verbindung mit einem Universalsensor, Artikel-Nr. 62505/030.

- Positionierung quer über das Bett in 1/3 Höhe der Liegefläche vom Kopfende aus gesehen
- Für Einzelbett
- Für Doppelbett werden zwei Sensormatten benötigt
- Anschlussleitung: 195 cm, weiß
- Gewicht: ca. 200 g
- Lebensdauer: 1 Jahr
- Anschluss-Stecker: RJ12 / Schließerkontakt
- Abmessungen (HxBxT): 5 x 762 x 103 mm



Stuhlsensormatte

D4106010A

Sensormatte zur Erfassung, ob eine Person auf dem Stuhl sitzt. Nutzung in Verbindung mit einem Universalsensor, Artikel-Nr. 62505/030.

- Positionierung zwischen Sitzkissen und Stuhlgestell
- Anschlussleitung: 195 cm, weiß
- Gewicht: ca. 100 g
- Lebensdauer: 1 Jahr
- Anschluss-Stecker: RJ12 / Schließerkontakt
- Abmessungen (HxBxT): 5 x 355 x 180 mm



Leitungen und Stecker

Anschlussleitung

75040007

zum Anschluss des Schalteingangs eines Lifeline Vi oder Lifeline Vi+ an eine Steckvorrichtung des Ruftasters mit 2 Steckvorrichtungen, Artikel-Nr. 75040005.

- 2 freie Drahtenden
- 8-poliger Mini-DIN-Stecker
- Leitungslänge: 3 m



Anschlussleitung

75087036

zum Anschluss des Schalteingangs eines Lifeline Vi oder Lifeline Vi+ an eine RJ45-Dose.

- Leitung schwarz
- Pfostenverbinder mit Schrumpfschlauch isoliert
- RJ45-Stecker
- Zugentlastung inkl. Klebepad und Kabelbinder
- Leitungslänge: ca. 3 m



TAE-N-Leitung mit Verriegelung, 3 m Länge

75087023

zum Anschluss eines Lifeline Vi, Lifeline Vi+, PiperFon Connect oder PiperFon Connect+ an die Buchse "N" einer TAE-Dose. Der Stecker wird verriegelt, d.h. gegen versehentliches Herausziehen geschützt. Ein Herausziehen des Steckers aus der Buchse ist nur mit Hilfe eines Werkzeugs möglich.

- TAE-N-Stecker mit Verriegelung
- Westernstecker
- 3 m Länge



TAE-N-Leitung mit Verriegelung, 6 m Länge**75087024**

zum Anschluss eines Lifeline Vi, Lifeline Vi+, PiperFon Connect oder PiperFon Connect+ an die Buchse "N" einer TAE-Dose. Der Stecker wird verriegelt, d.h. gegen versehentliches Herausziehen geschützt. Ein Herausziehen des Steckers aus der Buchse ist nur mit Hilfe eines Werkzeugs möglich.

- TAE-N-Stecker mit Verriegelung
- Westernstecker
- 6 m Länge

TAE-N-Leitung mit Verriegelung, 9 m Länge**75087025**


zum Anschluss eines Lifeline Vi, Lifeline Vi+, PiperFon Connect oder PiperFon Connect+ an die Buchse "N" einer TAE-Dose. Der Stecker wird verriegelt, d.h. gegen versehentliches Herausziehen geschützt. Ein Herausziehen des Steckers aus der Buchse ist nur mit Hilfe eines Werkzeugs möglich.

- TAE-N-Stecker mit Verriegelung
- Westernstecker
- 9 m Länge

TAE-N-Adapter mit RJ12-Buchse**S2209005**

zum Anschluss eines Lifeline Vi, Lifeline Vi+, PiperFon Connect oder PiperFon Connect+ an die linke N-Buchse einer TAE-Dose.

- Abmessungen (HxBxT): ca. 35 x 10 x 30 mm

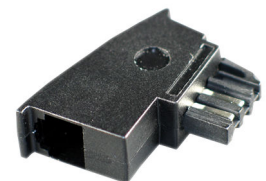**Anschlussleitung, 3 m Länge****75087028**

zum Anschluss eines Lifeline Vi, Lifeline Vi+, PiperFon Connect oder PiperFon Connect+ an die RJ12-Buchse des Adapters, Artikel-Nr. S2209005..

- 3 m Länge



Anschlussleitung, 6 m Länge**75087029**

zum Anschluss eines Lifeline Vi, Lifeline Vi+, PiperFon Connect oder PiperFon Connect+ an die RJ12-Buchse des Adapters, Artikel-Nr. S2209005.

- 6 m Länge

Anschlussleitung, 9 m Länge**75087030**

zum Anschluss eines Lifeline Vi, Lifeline Vi+, PiperFon Connect oder PiperFon Connect+ an die RJ12-Buchse des Adapters, Artikel-Nr. S2209005.

- 9 m Länge

Western-Verbindungskabel**D3205143**

zum Anschluss eines Telefons mit Western-Buchse an ein Lifeline Vi, Lifeline Vi+, PiperFon Connect oder PiperFon Connect+.

- 2 x Westernstecker
- Länge: 3 m



Einbaudosen, Aufputz-Kappen

Aufputz-Kappe, 1-fach, alpinweiß**19920016**

Aufputz-Kappe, 1-fach, mit integrierter Bodenplatte und integrierterem Rahmen, z.B. zur Aufputzmontage von Funk-Zugtaster-T UP (Artikel-Nr. Z00820295).

- Abmessungen (HxBxT): 85 x 85 x 47 mm
- Einbautiefe: max. 34 mm
- Farbe: alpinweiß
- Material: Duroplast
- Artikelnr. des Herstellers JUNG: AS 581 A WW



Wechselträger-Set für Aufputz-Kappe, 1-fach

Z00820297

Set zur Wandmontage einer Aufputz-Kappe, 1-fach (Artikel-Nr. 19920016).

Lieferumfang

- Wechselträger
- Wandhalterung
- Montagematerial

Montage

1. Wechselträger mit Aufputz-Kappe verschrauben.
2. Wandhalterung mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen.
3. Geräteeinheit (aus 1.) auf Wandhalterung aufschieben. Fixierung erfolgt mechanisch und magnetisch.


Vorteile gegenüber einfacher Wandmontage

- Werkzeugloses Abnehmen des Gerätes von der Wand möglich.
- Optionaler Positionswechsel bei Verwendung zusätzlicher Wandhalterungen (Artikel-Nr. Z00820298).

Farbe: Verkehrsweiß, RAL 9016

Material: ABS

Abmessungen (HxBxT): 85 x 85 x 10 mm

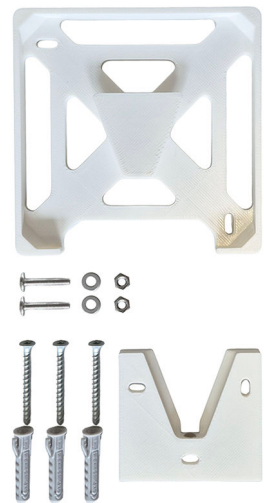

Wandhalterung für Wechselträger

Z00820298

Zusätzliche Wandhalterung für Wechselträger-Set (Artikel-Nr. Z00820297) zur magnetischen Aufnahme der Geräteeinheit bestehend aus Wechselträger mit Aufputz-Kappe.

Inkl. 3 Schrauben und Dübel.

Farbe: Verkehrsweiß, RAL 9016

Material: ABS

Abmessungen (HxBxT): 45 x 50 x 6 mm



Einbaudose Mauerwerk, 1-teilig, Einbauöffnung: Ø 60 mm

17010000

Tiefe: 46 mm



Einbaudose Hohlwand, 1-teilig, Fräsloch: Ø 68 mm

17510000

Tiefe: 47 mm



Wir definieren Connected Care & Connected Health neu

Seit rund 65 Jahren ist Tunstall Healthcare Vorreiter beim Einsatz von Technologie, um Menschen, die Versorgungs- und Gesundheitsinterventionen benötigen, dabei zu unterstützen, unabhängig zu sein. Ziel ist es, Unabhängigkeit und Sicherheit in Einklang zu bringen und eine maßgeschneiderte Unterstützung anzubieten, die den Bedürfnissen des Einzelnen jetzt und in Zukunft gerecht wird.

Unsere Lösungen und Dienstleistungen ermöglichen ein unabhängiges Leben, indem sie neue Betreuungsmodelle definieren und vernetzte globale Gesundheitslösungen schaffen, die täglich mehr als fünf Millionen Menschen unterstützen.

Tunstall GmbH
Orkotten 66
48291 Telgte, Deutschland
Telefon: +49 (0) 2504/701-0
E-Mail: DE.Info@tunstall.com

www.tunstall.de

Tunstall